

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ S PŘEDNÍMI KOLEČKY

12/SC, 202 ELC, 206 ELC



CE

POUŽITÍ

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS

Rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn dvěma výškově nastavitelnými nohama s protiskluzovými pryžovými nástavci a dvěma výškově nastavitelnými nohama s plnými kolečky. Chodítka je vybaveno ergonomickými plastovými rukojeťmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	Velikost	Výška (cm)	Šířka (cm)	Hloubka (cm)	Hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
12/SC	1	76-83	52	45	2,10	160
12/SC	2	83-90	55	49	2,15	160
12/SC	3	99-106	57	50	2,20	160
202 ELC	5	90-98	67	60	2,40	160
202 ELC	6	81-89	66	58	2,20	160
202 ELC	7	70-78	65	52	2,00	160
206 ELC	5	90,5-98,5	62	49	2,30	160
206 ELC	6	83,5-91,5	60	49	2,20	160
206 ELC	7	73-81	59	49	2,10	160

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Chodítka nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 160 kg.

Při nastavování výšky chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

OBSAH BALENÍ

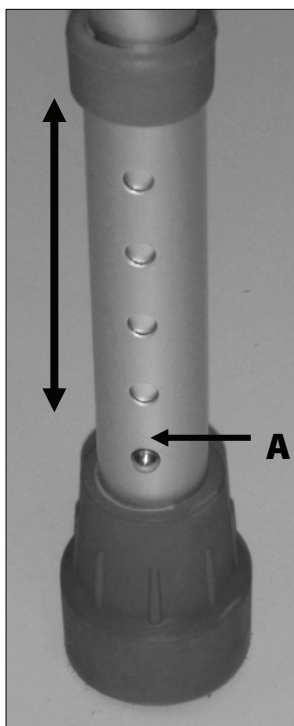
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítka se čtyřmi výškově nastavitelnými nohama, přední dvě jsou navíc vybaveny plnými kolečky.

NASTAVENÍ VÝŠKY CHODÍTKA

Pro nastavení výšky chodítka zamáčkněte z obou stran pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.



Umístění aretačních pojistek

Zamáčkněte aretační pojistku
a nastavte délku nohy

ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců, předních koleček a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce (typ 100 CTE, vnitřní průměr 25 mm).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

