

NÁVOD K POUŽITÍ

PRKNO PRO PŘESUN

ADL 23



CE

POUŽITÍ

Prkno pro přesun je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen se přesunout. Svou konstrukcí a zahnutým tvarem usnadňuje pacientům přesun například z lůžka na židli, z židle na invalidní vozík, z invalidního vozíku na autosedačku atd.. Zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny, varování a bezpečnostní upozornění. Prosíme, dodržujte tyto pokyny.

POPIS

Prkno je vyrobeno z polyetylenu (PE). Je vybaveno protiskluzovými nálepkami na spodní straně a držadlem pro přenos.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka prkna: 77 cm


Hloubka prkna: 22,2 cm

Výška prkna: 1 cm

Šířka sedu: 45 cm

Hmotnost: 1,5 kg

Nosnost: 130 kg (Při vzdálenosti 30 cm mezi opěrnými body (D)!)
180 kg (Při vzdálenosti 20 cm mezi opěrnými body (D)!)

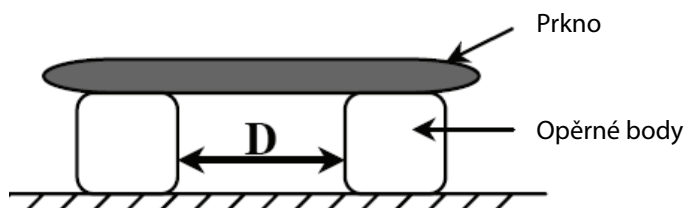

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním prkna si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním prkna konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Prkno nepoužívejte, pokud je vzdálenost mezi oběma opěrnými body vyšší než 30 cm.

Před každým použitím zkontrolujte, zda deska je správně umístěna na obou opěrných bodech a je naprosto stabilní.

Před přesunem zkontrolujte, zda jsou stabilní také oba opěrné body. V případě potřeby je zafixujte (např. zabrzděním invalidního vozíku apod.).

Obě protiskluzové nálepky na spodní straně prkna musí celou plochou přesně sedět na opěrných bodech. V opačném případě prkno nepoužívejte!

Před použitím se vždy ujistěte se, že povrch prkna suchý.

Uživatel by nikdy neměl mít poruchy rovnováhy a měl by být schopen sedět sám bez pomoci.

Prkno vytáhněte, až když je pacient plně přesunutý a na prknu již nesedí.

Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost prkna (viz Technické parametry)

OBSAH BALENÍ

Prkno pro přesun.

INSTRUKCE PRO PŘESUN

Prkno stabilně umístěte na dva taktéž stabilní opěrné body tak, aby vzdálenost mezi nimi nepřesahovala 30 cm (viz bezpečnostní upozornění). Protiskluzové nálepky směřují dolů a celou svou plochou se dotýkají podkladu. Držadlo směřuje dopředu. Přesun provádí po desce pacient sám nebo s pomocí asistenční osoby.



Vrchní plocha pro přesun



Spodní plocha s protiskluzovými nálepkami

ÚDRŽBA

Prkno lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a bělicí prostředky. Po ošetření vždy osušte suchým měkkým hadříkem. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav protiskluzových nálepek a rovnost i hladkost povrchu prkna.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

