

NÁVOD K POUŽITÍ

RAMPA NÁJEZDOVÁ TELESKOPICKÁ

ADL 26



CE

POUŽITÍ

Nájezdové rampy tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Ulehčují překonání menší schodišťové nebo jiné výškové bariéry a usnadňují tak např. naložení mechanického a elektrického vozíku nebo skútru do auta.

POPIS

Lehká a skladná teleskopická třídílná duralová konstrukce je vybavena protiskluzovým povrchem a umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka rampy: 150 cm (A), 210 cm (B)

Šířka: 25,8 cm

Výška: 6,5 cm

Hmotnost : 2x5 kg (A), 2x6,25 (B)

Nosnost: 120 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním ramp si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Při manipulaci s rampou postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.


Nepřekračujte maximální nosnost ramp 120 kg.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny tři díly rampy.

ROZLOŽENÍ A INSTALACE RAMPY:

Pro rozložení rampy zamáčkněte aretační pojistku (A) a vysuňte zvolený díl do plné délky, až pojistka sama opět zapadne. Lze vysunout pouze jeden, nebo oba díly, čímž lze dosáhnout délky až 150 cm (typ A) resp. 210cm (typ B). Při skládání postupujte opačně.

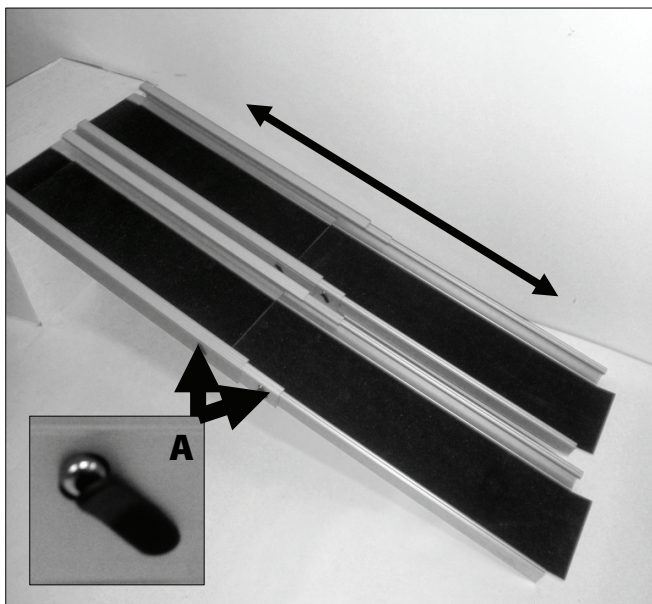

ÚDRŽBA

Rampy lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

