



DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIŘU ADL 39

Držák toaletního papíru tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility.

Držák toaletního papíru je vybaven úchytem toaletního papíru (obr. 2) a uvolňovacím tlačítkem (obr. 4).



Před použitím nasadíme na úchyt (obr. 1) toaletní papír (cca 6 útržků), který před upevněním přeložíme na půl. Toaletní papír upevníme tím, že ho zasadíme směrem dovnitř do jamky úchytu (obr. 1), obtočíme volný konec okolo úchytu a zatlačíme ho znovu do jamky úchytu (obr. 2).

Držák toaletního papíru se používá k očištění vaginální a anální části těla. Očistu doporučujeme provádět přímo při sezení na míse (obr. 3), a to ze předu nebo ze zadu.

Po použití vložíme spodní část nad záchodovou mísu a zmáčkneme uvolňovací tlačítko. Toaletní papír se tímto pohybem uvolní (obr. 4)

ÚDRŽBA:

Na očištění spodní části držáku použijte navlhčené kapesníky nebo utěrky na jedno použití namočené v mírně namydlené vodě. Po očištění držák osušte. Výrobek se nesmí ponořovat pod vodu! Doporučujeme očistit držák toaletního papíru po každém použití.

UPOZORNĚNÍ:

Pouze k zevnímu užití!

Nepoužívejte produkt, jestliže je jakkoliv poškozen.

Nepoužívejte držák toaletního papíru ve vaně a sprše.

Pro dodržení osobní hygieny musí být držák toaletního papíru používán pouze jedním uživatelem.

ZÁRUKA:

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození.

Varování! Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. a nevhodný způsob použití mohou ovlivnit délku poskytované záruky.

DMA PRAHA s.r.o.

Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 664 465-6, fax.: 323 664 335, dmapraha@dmapraha.cz, www.dmapraha.cz

Vzhledem k neustále snaze o zdokonalení výrobků si firma DMA Praha s. r. o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.