

NÁVOD K POUŽITÍ

BERLE PODPAŽNÍ

131



CE

POUŽITÍ

Berle je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Berle je určena pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácviku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna pohodlným ergonomickým vyměkčeným madlem a podpažní opěrkou. Madlo i opěrka jsou výškově nastavitelné. Ve spodní části je berle opatřena pryžovým protiskluzovým nástavcem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	výška opěrky (cm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)	nástavec (typ)
131 A	138-158	0,70	100	100 CTD (21mm)
131 B	158-178	0,80	100	100 CTD (21mm)
131 C	178-198	0,90	100	100 CTD (21mm)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním berle si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním berle konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Berli nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz tabulka).

Při nastavování výšky madla nebo podpažní opěrky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí - nebezpečí úrazu.

Při chůzi s berlí vždy použijte vhodnou obuv s pevnou patou.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části berle, tj. berli s madlem, opěrkou a protiskluzovým pryžovým nástavcem.

NASTAVENÍ VÝŠKY PODPAŽNÍ OPĚRKY:


Pro nastavení výšky berle zamáčkněte pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku podpažní opěrky. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Nově zvolené výšce berle nezapomeňte přizpůsobit také polohu madla (viz níž).

NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA


Pro nastavení výšky madla vyšroubujte šroub (B), nastavte optimální délku berle a šroub opět zašroubujte.

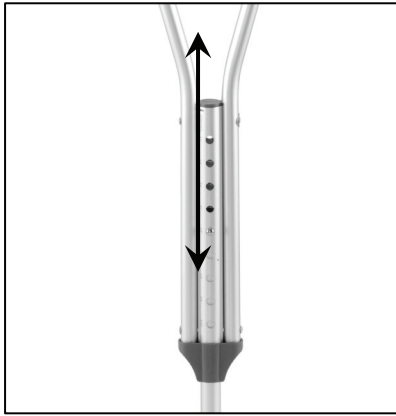

Nastavení výšky berle

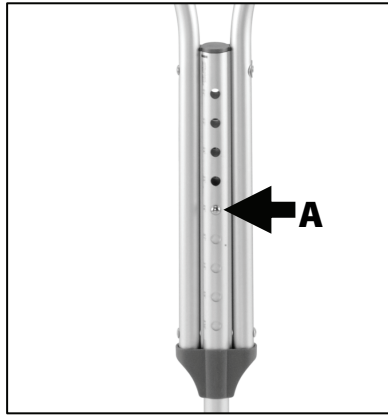

Umístění aretační pojistky

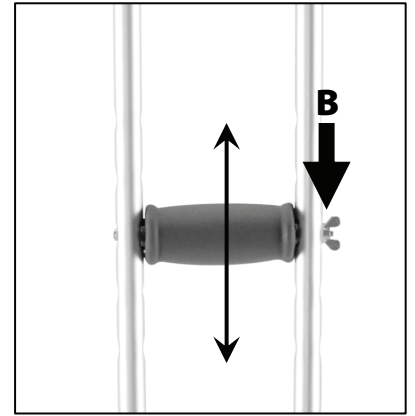

Nastavení výšky madla

Optimální výšku podpažní opěrky i madla zjistíte tak, že postavíte-li berle pryžovým nástavcem asi 10cm před tělo a zároveň asi 15cm od těla na každou stranu, měly by sahat zhruba 5cm pod podpaždí. Lokty by přitom měly být pohodlně pokrčeny. Nastavení vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

ÚDRŽBA

Berli lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability a funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaný pryžový nástavec (viz tabulka).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

