

# NÁVOD K POUŽITÍ

BERLE FRANCOUZSKÁ PŘEDLOKETNÍ

# 333



# CE

## POUŽITÍ

Berle je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Berle je určena pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

## POPIS

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna pohodlným ergonomickým plastovým (333 K-C), vyměkčeným (333 K-SC) nebo vyměkčeným anatomickým (333 K-ASC) držadlem a uzavřenou sklopnou plastovou výškově nastavitelnou opěrkou. Berle jsou výškově nastavitelné a ve spodní části jsou opatřeny maticí tlumící klapání berle a pryžovým protiskluzovým nástavcem.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	od držadla k zemi (cm)	od držadla k opěrce (cm)	celková výška (cm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)	protiskluzový nástavec
333 K-C	76-96	22-24,5	98-120,5	0,60	120	100 CTB/C
333 K-SC	76-96	22-24,5	98-120,5	0,65	120	100 CTB/C
333 K-ASC	76-96	22-24,5	98-120,5	0,65	120	100 CTB/C

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním berle si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním berle konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Berli nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz tabulka).

Při nastavování výšky madla nebo předloketní opěrky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí, hrozí nebezpečí úrazu.

Při chůzi s berlí vždy použijte vhodnou obuv s pevnou patou.

## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části berle, tj. berli s držadlem, maticí tlumící klapání, opěrkou předloktí a protiskluzovým pryžovým nástavcem.


## NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA

Pro nastavení výšky držadla povolte matici tlumící klapání berle (A), vytáhněte aretační „E“ pojistku (B), tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku držadla, pojistku zasuněte zpět a matici dotáhněte, čímž zároveň maximálně omezíte případné klapání berle.

## NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRKY PŘEDLOKTÍ:

Pro nastavení výšky opěrky zamáčkněte pojistku (C) a tahem/tlakem nastavte požadovanou výšku opěrky. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru (3 polohy).

Optimální nastavení berle vždy konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

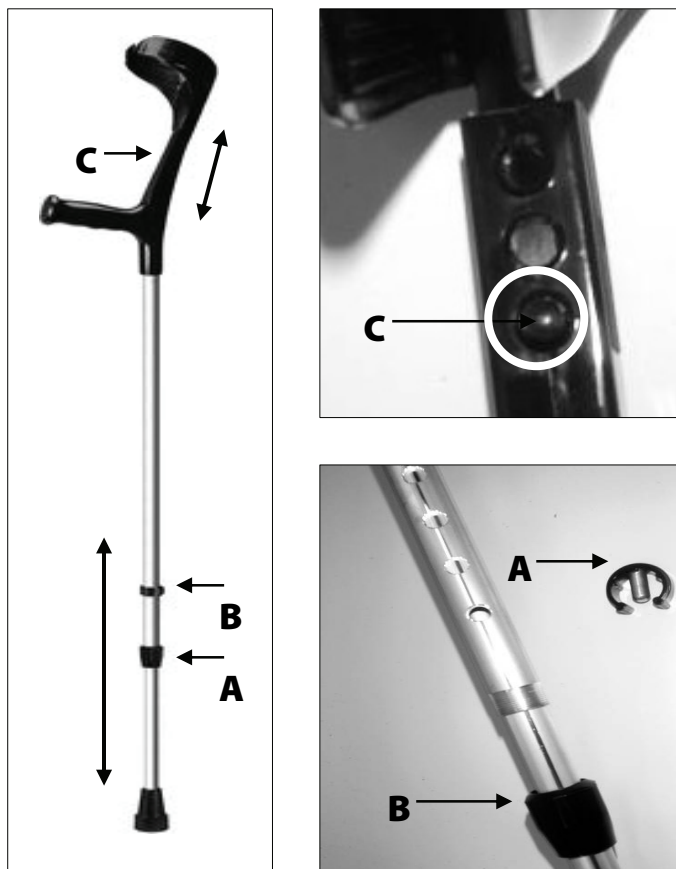

Umístění aretačních pojistek

„E“ pojistka, matice tlumící klapání berle a pojistka opěrky

## ÚDRŽBA

Berli lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaný pryžový nástavec (viz tabulka).

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.