

# NÁVOD K POUŽITÍ

FRANCOUZSKÁ PŘEDLOKETNÍ BERLE

# 220



# CE

## POUŽITÍ

Berle je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Berle je určena pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

## POPIS

Skládací konstrukce berle je vyrobena z carbonových trubek vysoké pevnosti, doplněna otevřenou opěrkou předloktí a pohodlným vyměkčeným anatomickým držadlem pro pravou nebo levou ruku. Držadlo i opěrka jsou vybaveny odrazkou. Berle jsou výškově nastavitelné a ve spodní části je opatřena pryžovým protiskluzovým nástavcem. Součástí vybavení je transportní obal.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

typ berle	celková výška (cm)	od držadla k zemi (cm)	od držadla k opěrce (cm)	průměr opěrky (cm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)	protiskluzový nástavec (typ, průměr)
220	97-120	74-97	23	9	0,50	140	100 CTC (18 mm)

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním berle si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním berle konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Berli nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz tabulka).

Při nastavování výšky madla nebo předloketní opěrky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí, hrozí nebezpečí úrazu.

Při chůzi s berlí vždy použijte vhodnou obuv s pevnou patou.

## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části berle, tj. berli s držadlem, opěrkou předloktí, protiskluzovým pryžovým nástavcem a transportním potahem.

## NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA

Pro nastavení výšky držadla zmáčkněte pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku. Poté nechte pojistku samovolně zapadnout do zvoleného otvoru.

Optimální nastavení výšky držadla berle vždy konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

## SLOŽENÍ A ROZLOŽENÍ HOLE

Dva sousední díly rozpojte po zmáčknutí pojistky (A) tahem od sebe. Tímto způsobem postupujte stejně v horní části berle zmáčknutím pojistky (B). Pro zajištění berle ve složeném stavu použijte plastovou fixaci (C). Pro transport doporučujeme používat přiložený obal. Při rozkládání berle postupujte opačně.



## ÚDRŽBA

Berli lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaný pryžový nástavec (viz tabulka).

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.