

NÁVOD K POUŽITÍ

FRANCOUZSKÁ PŘEDLOKETNÍ BERLE

5030



CE

POUŽITÍ

Vícebodové berle jsou součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Berle je určena pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci, zejména tam, kde je výrazně snížena stabilita pacienta.

POPIS

Konstrukce berle je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna otevřenou opěrkou předloktí a pohodlným ergonomickým vyměkčeným držadlem. Berle je výškově nastavitelná a ve spodní části je opatřena maticí tlumící klapání berle a čtyřmi pryžovými protiskluzovými nástavcem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

typ berle	celková výška (cm)	od držadla k zemi (cm)	od držadla k opěrce (cm)	průměr opěrky (cm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)	protiskluzový nástavec (typ, průměr)
5030	97,5-106,5	76-85	21,5	9	0,94	100	100 CTC (18 mm)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním berle si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním berle konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Berli nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz tabulka).

Při nastavování výšky madla nebo předloketní opěrky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí, hrozí nebezpečí úrazu.

Při chůzi s berlí vždy použijte vhodnou obuv s pevnou patou.


OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části berle, tj. berli s držadlem, maticí tlumící klapání, opěrkou předloktí a všechny čtyři protiskluzové pryžové nástavce.

NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA

Pro nastavení výšky držadla povolte matici tlumící klapání berle (A), vytáhněte aretační „E“ pojistku (B), tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku držadla, pojistku zasuněte zpět a matici dotáhněte, čímž zároveň maximálně omezíte případné klapání berle.

Optimální nastavení berle vždy konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

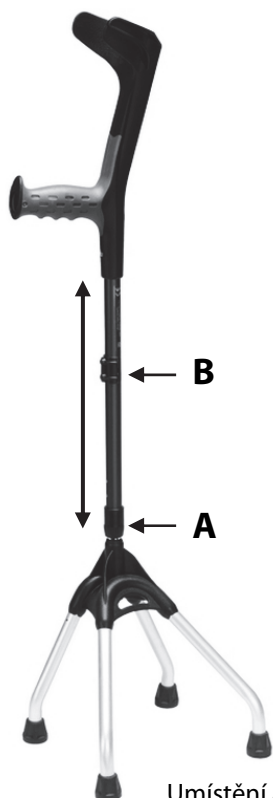

Umístění aretačních pojistek

ÚDRŽBA

Berli lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaný pryžový nástavec (viz tabulka).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.