

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ

12/S, 202 EL, 206 EL



CE

POUŽITÍ

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS

Rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi výškově nastavitelnými nohama s protiskluzovými pryžovými nástavci. Chodítka je vybaveno ergonomickými plastovými rukojeťmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Typ | Velikost | Výška (cm) | Šířka (cm) | Hloubka (cm) | Hmotnost (kg) | Nosnost (kg) |
|--------|----------|--------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 12/S | 1 | 73-80 | 52 | 42 | 1,90 | 160 |
| 12/S | 2 | 80-87 | 55 | 46 | 2,00 | 160 |
| 12/S | 3 | 97-104 | 57 | 48 | 2,10 | 160 |
| 202 EL | 5 | 87-95 | 67 | 57 | 2,20 | 160 |
| 202 EL | 6 | 77-85 | 66 | 55 | 2,00 | 160 |
| 202 EL | 7 | 67-75 | 65 | 49 | 1,85 | 160 |
| 206 EL | 5 | 87-95 | 62 | 46 | 2,10 | 160 |
| 206 EL | 6 | 80-88 | 60 | 46 | 2,00 | 160 |
| 206 EL | 7 | 70-78 | 59 | 46 | 1,90 | 160 |

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Chodítka nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 160 kg.

Při nastavování výšky chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

OBSAH BALENÍ

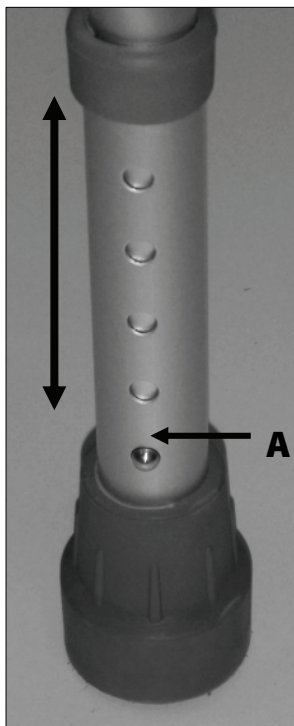
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítka se čtyřmi výškově nastavitelnými nohama.

NASTAVENÍ VÝŠKY CHODÍTKA

Pro nastavení výšky chodítka zamáčkněte z obou stran pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.



Umístění aretačních pojistek

Zamáčkněte aretační pojistku
a nastavte délku nohy

ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce (typ 100 CTE, vnitřní průměr 25 mm).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

