

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ SKLÁDACÍ

230, 230 EL, 233 EL



CE

POUŽITÍ

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci. Je vhodné též pro transport drobných předmětů.

POPIS

Skládací rám chodítka je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi výškově nastavitelnými nohama s protiskluzovými pryžovými nástavci. Typ 230 EL má navíc kloubovou vzpěru umožňující tzv. krokování. Chodítka je vybaveno pojistkou sklápění a ergonomickými pěnovými rukojeťmi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška: 81-99 cm

Celková šířka: 62 cm (230), 57 cm (230 EL, 233 EL)

Hmotnost: 2,7 kg (230), 2,9 kg (230 EL, 233 EL)

Nosnost: 100 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Chodítka nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 100 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. chodítka se čtyřmi výškově nastavitelnými nohama.

ROZLOŽENÍ A SLOŽENÍ CHODÍTKA


Chodítka rozložte rozevřením boků chodítka směrem od sebe až do polohy, kdy zapadne bezpečnostní pojistka (A), chráněná plastovou krytkou, umístěná na horní vzpěře chodítka. Pro složení chodítka zmáčkněte bezpečnostní pojistku (A) a tlačte boky chodítka směrem k sobě. Chodítka je výškově nastavitelné.

NASTAVENÍ VÝŠKY CHODÍTKA

Pro nastavení výšky chodítka zamáčkněte z obou stran pojistku (B) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.



Bezpečnostní pojistka složení rámu.

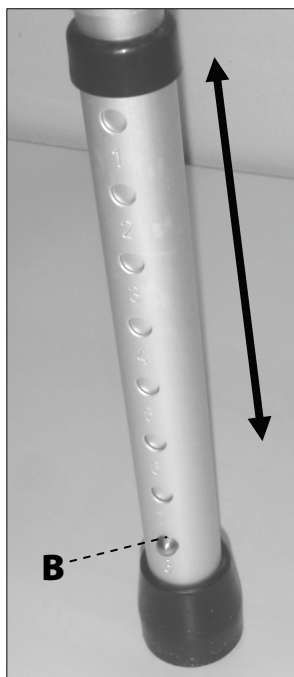

Pojistka k nastavení výšky rámu.

KLOUBOVÝ MECHANISMUS

U typu 230 EL využijete při pohybu výhody kloubové konstrukce – střídavé odlehčení bočního rámu na jedné straně a jeho následné předsunutí o krok vpřed Vám výrazným způsobem usnadní manipulaci a zajistí nácvik správného stereotypu chůze.

ÚDRŽBA

Chodítka lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

