

NÁVOD K POUŽITÍ

CHODÍTKO TŘÍKOLOVÉ

240 S, 240 SL



CE

POUŽITÍ

Chodítka je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Chodítka je určeno pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Skládací odlehčený rám chodítka je vyroben z povrchově upravených ocelových (240 S) nebo duralových (240 SL) trubek vysoké pevnosti, doplněn třemi plnými kolečkami, z nichž přední má uložení v otočné vidlici a pohodlnými ergonomickými výškově nastavitelnými rukojeťmi. Chodítka je vybaveno bowdenovými brzdami s možností aretace.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška madel: 79-91,5 cm

Celková šířka: 64 cm

Hmotnost: 6,7 kg (240 S), 5,5 kg (240 SL)

Nosnost: 125 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním chodítka si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním chodítka konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Chodítka nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 125 kg.

Při skládání a rozkládání chodítka postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li chodítka v klidu, vždy zaaretujte brzdy.


Při užívání chodítka musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám chodítka s madly a kolečky, bowdenové brzdy a 2 šrouby s maticí s plastovou krytkou k zajištění nastavení výšky madel.

SLOŽENÍ A NASTAVENÍ CHODÍTKA


Rám chodítka vyjměte z krabice, rám rozložte směrem od sebe a polohu zajistěte aretační pojistkou (A). Přiložená madla vložte do otvorů (B), nastavte požadovanou výšku madel a zvolenou pozici upevněte pomocí šroubu a matice s umělohmotnou krytkou (1). Šrouby pečlivě dotáhněte. Bowdenová lanka by měla vézt zevně rámu i madel. Nyní je chodítko připraveno k použití. Při složení chodítka postupujte opačným způsobem.

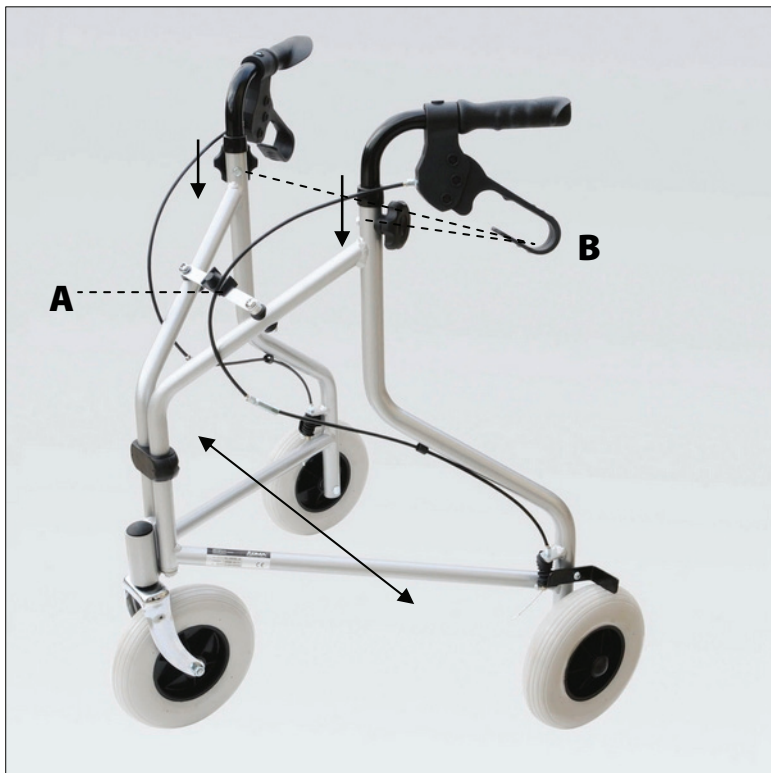

Madla zasuňte do otvorů **A**, opěrku zad do otvorů **B**.

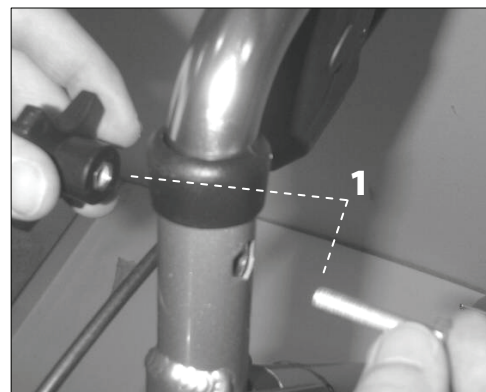


Madla upevněte pomocí šroubu a matice.

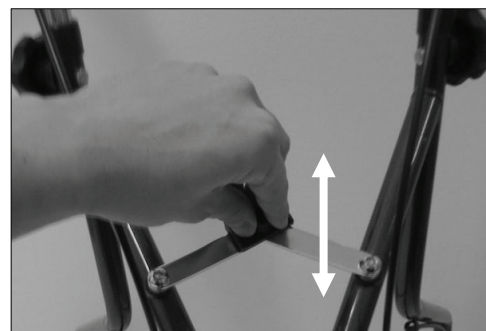

Aretační pojistka

BRZDY

Před každým použitím vyzkoušejte správnou funkci brzd. Při stlačení páky brzdy (A) směrem nahoru by chodítko mělo přibrzdit až úplně zastavit. Stlačením páky brzdy směrem dolů, by se měly brzdy zaaretovat. Opačným postupem brzdy odblokujete. Vždy používejte obě brzdy !!!

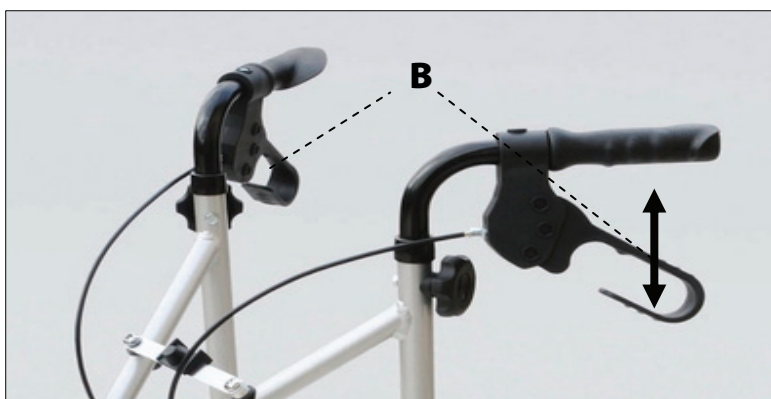

Kolečka by se měla volně otáčet a nedrhnout a při úplném zabrždění se neprotáčet. Pokud tomu tak není, seřídte brzdy pomocí šroubů bowdenového lanka.



ÚDRŽBA

Chodítko lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav koleček a pro plynulé a bezhlučné ovládání bowdenových brzd pravidelně promazat ovládací lanka, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.