

# NÁVOD K POUŽITÍ

HŮL SKLÁDACÍ

# 413 A



CE

## POUŽITÍ

Hůl je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Hůl je určena pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

## POPIS

Skládací konstrukce hole je vyrobena z duralových trubek vysoké pevnosti, doplněna pohodlným ergonomickým držadlem a poutkem. Hůl je výškově nastavitelná a ve spodní části je opatřena pryžovým protiskluzovým nástavcem

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	výška hole (cm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)	protiskluzový nástavec
413 AS	68,5-78,5	0,40	125	100 CTC
413 A	78,5-88,5	0,40	125	100 CTC

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním hole si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním hole konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Hůl nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz tabulka).

Při nastavování výšky a skládání/rozkládání hole postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí, hrozí nebezpečí úrazu.

Při chůzi s holí vždy použijte vhodnou obuv s pevnou patou.


## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části hole, tj. hůl s držadlem, poutko a protiskluzový pryžový nástavec.

## NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA

Pro nastavení výšky držadla zmáčkněte pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku držadla. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru.


Optimální nastavení výšky držadla vždy konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

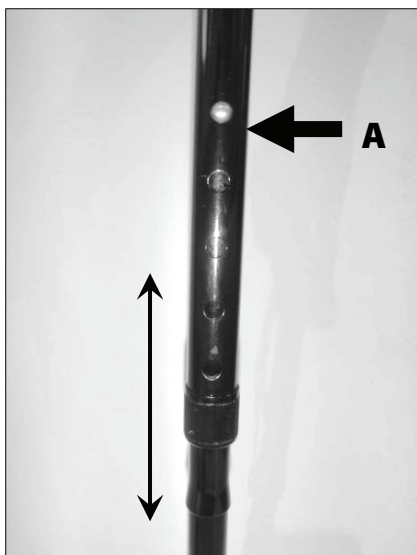

Umístění aretační pojistky

### SLOŽENÍ/ROZLOŽENÍ HOLE:


Dva sousední díly rozpojte tahem od sebe. Tímto způsobem lze rozpojit celou hůl na čtyři díly. Pro zajištění hole ve složeném stavu použijte plastovou fixaci (B). Při rozkládání hole postupujte opačně.

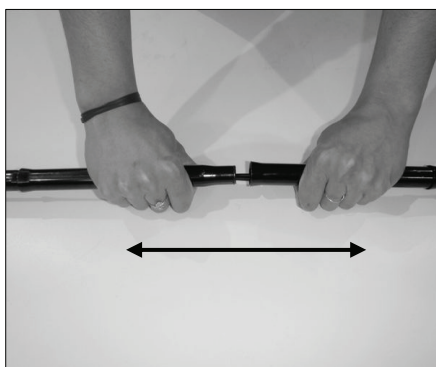

Rozpojení sousedních dílů



Složení hole

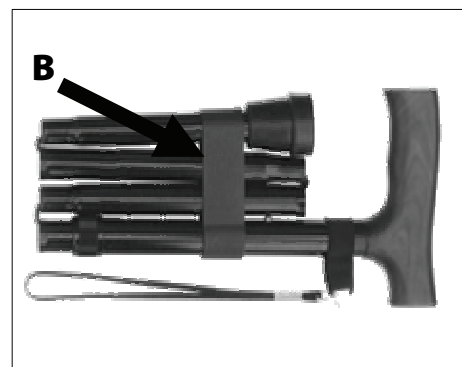

Použití plastového fixátoru

### ÚDRŽBA

Hůl lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu a stav všech jisticích prvků, pryžových nástavců a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaný pryžový nástavec (viz tabulka).

### SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.