

NÁVOD K POUŽITÍ

HŮL VÍCEBODOVÁ DĚTSKÁ

424 AJ



CE

POUŽITÍ

Hůl je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Hůl je určena pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi, nácvičku chůze, poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci.

POPIS

Konstrukce hole je vyrobena z ocelových trubek vysoké pevnosti, doplněna pohodlným ergonomickým držadlem. Hůl je výškově nastavitelná a ve spodní části je opatřena pryžovým třemi protiskluzovými nástavci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ	výška hole (cm)	hmotnost (kg)	nosnost (kg)	protiskluzový nástavec
424 AJ	49-59	0,90	50	100 CTB (16 mm)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním hole si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním hole konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Hůl nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz tabulka).

Při nastavování výšky hole postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi ve vlhkém prostředí, hrozí nebezpečí úrazu.

Při chůzi s holí vždy použijte vhodnou obuv s pevnou patou.


OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části hole, tj. hůl s držadlem a protiskluzové pryžové nástavce.

NASTAVENÍ VÝŠKY DRŽADLA

Pro nastavení výšky držadla zmáčkněte pojistku (A) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku držadla. Pojistku pak nechte samovolně zapadnout do zvoleného otvoru.

Optimální nastavení výšky držadla vždy konzultujte s vaším ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

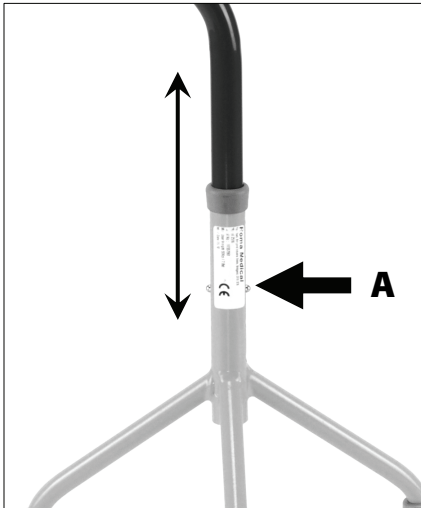

Umístění aretační pojistky

ÚDRŽBA

Hůl lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu a stav všech jisticích prvků, pryžových nástavců a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebovaný pryžový nástavec (viz tabulka).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.