


maclaren®

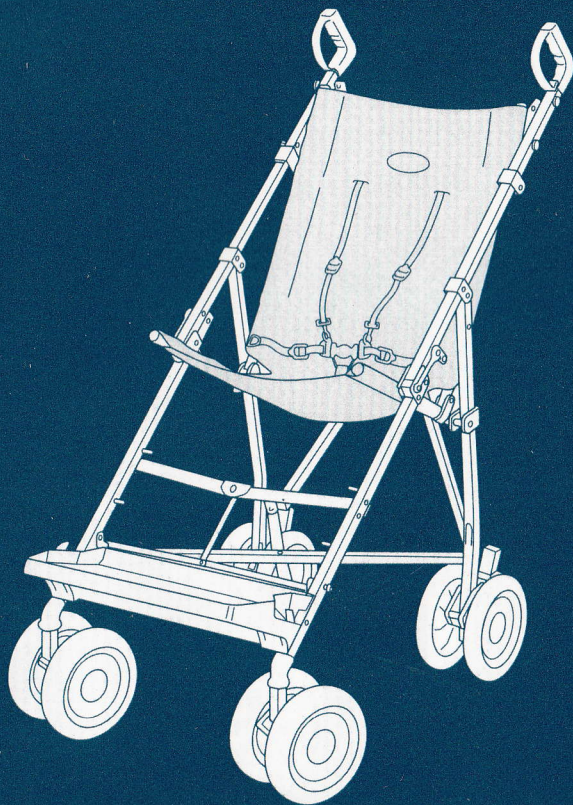

Major Elite

Attendant User Guide

CE

Úvod

Kočárek Major Elite je lehký skládací kočárek určený pro krátké vyjíždky pro děti o váze až do 50 kg, které nemají vážnější problémy s držení těla a potřebují minimální oporu.

Před použitím se poraďte s odborným lékařem o vhodnosti používání tohoto výrobku.

Kočárek Major Elite se dá upravit i pro menší dítě pomocí páru bočních opěrek, které jsou součástí doplňkové výbavy. Poradte se s dodavatelem nebo vyhledejte radu ve středisku invalidních vozíků.

Kočárek by měl ovládat a mít pod dohledem zodpovědný, dostatečně silný dospělý jedinec.

Lehká skládací konstrukce umožňuje snadné uskladnění. Ve složeném stavu je možné kočárek snadno naložit do zavazadlového prostoru auta, buď úhlopříčně nebo na šířku.

Důležité části kočárku

1	1	Horní opěrka	4	Opěrka na nohy	7	Brzdy
	2	Patentní svorky	5	Svorka pro skladovací polohu		
	3	Dolní opěrky	6	Ochranné popruhy		

Bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM SI, PROSÍM, PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPADNÉ DOHLEDÁNÍ INFORMACÍ

- Před použitím se poraďte s odborným lékařem o vhodnosti používání tohoto výrobku.
- Obsluha by měla být obeznamenána s ovládním kočárku - pokud si nejste jisti, zastavte a nahlédněte do tohoto návodu k použití. Radu ohledně správného a bezpečného používání tohoto kočárku obdržíte v místním centru invalidních vozíků.
- Všimněte si, jak se dítě rádo vozí. Spolupráce mezi obsluhou a dítětem snižuje riziko zranění při nasedání a manévrování.
- Nedovolte dítěti nasedat do kočárku bez pomoci.
- Nepřetěžujte kočárek dalším dítětem nebo nákupem. Nezávěšujte na držadla tašky ani jiné předměty.
- Než vyjedete, přesvědčte se, že je dítě pohodlně usazeno a že má zastrčené šaty či pokrývku, aby se nezapletly do kola.
- Dbejte na to, aby bylo dítě vždy správně připoutáno řemenem přes pás a bederními ochrannými popruhy upravenými podle velikosti dítěte. Obsluha musí vědět jak se zapínají, upravují a uvolňují přezky a svorky.
- Nestoupejte na opěrku na nohy.
- Držte kočárek, když jste v blízkosti silnice nebo trati. I když je kočárek zajištěn parkovacími brzdami, závan projíždějícího vozidla jej může uvést do pohybu.
- Když se kočárek nepohybuje, vždy jej zajistěte parkovacími brzdami.
- Při přejíždění obrubníků dávejte vždy dobrý pozor.
- Před jízdou na eskalátorech dítě vsaďte a kočárek složte.
- Při přejíždění obrubníku nikdy nenaklánějte kočárek dopředu.
- Nepokoušejte se brát kočárek nahoru nebo dolů po schodech, pokud si vy i váš pomocník nejste jisti, že máte kočárek pod kontrolou a že jej i s dítětem unesete.
- Je zakázáno používat kočárek Major Elite jako dětskou sedačku v motorovém vozidle nebo v autobuse.
- Nikdy nenechávejte dítě v kočárku bez dozoru, ani na okamžik.
- Obsluha by měla pamatovat na nebezpečí požáru. V budovách zjistěte, kde se nacházejí nouzové východy, a seznamte se s postupem opouštění budovy v případě požáru.
- Nenechávejte děti, aby si s kočárkem hrály nebo se na něj zavěšovaly.
- Nepoužívejte kočárek k účelům, pro které není určen.
- Než provedete úpravy, přesvědčte se, že se dítě nedotýká pohyblivých částí.
- Při skládání a rozkládání kočárku dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.
- Firma Maclaren nemůže přijmout odpovědnost za používání příslušenství od jiné firmy. Na škody způsobené použitím příslušenství dodaného jinou firmou než Maclaren se nevztahují podmínky naší záruky.

Příprava k použití

2 Rozložení kočárku

Uvolněte svorku pro skladovací polohu a kočárek rozložte.

3 Při rozkládání kočárku dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.

Horní i dolní opěrku zatlačte úplně dolů, až zaklapnou patentní svorky.

Nasazení opěrky na nohy

Zvolte si výškovou pozici, která vašemu dítěti nejvíce vyhovuje.

4 Zaklapněte opěrku na nohy do opěrných kolíků buď pro dolní, střední nebo horní polohu a zatlačte opěrku na nohy směrem nahoru, až úplně zaklapnou obě svorky.

Používání

Ovládání parkovacích brzd

5 JAK ZAJISTIT PARKOVACÍ BRZDY:

Sešlápněte OBA brzdové pedály směrem k sobě tak, aby kolíky brzd pevně zapadly do paprsků kol.

JAK UVOLNIT PARKOVACÍ BRZDY:

Zatlačte nohou na OBA brzdové pedály směrem dopředu.

Parkovací brzdy nejsou určeny ke zpomalování pohybujiícího se kočárku.

Používání ochranných popruhů

JAK PŘIPNOUT POPRUHY:

- 6
- A Zasuňte obě přezky pevně do sebe.
 - B Posunutím přezky seříďte délku pásku. Řemen přes pás i bederní popruhy by měly těsně přiléhat.

JAK UVOLNIT OCHRANNÉ POPRUHY:

- 7
- C Stisknutím vidlice rozpojte přezku od sebe. Popřípadě rozeprňte i přezky bederních popruhů.
 - D K připojení dalších popruhů v případě potřeby slouží „D“-kroužky.

Popruhy nemusejí být ve všech případech přiměřené - měli byste to zkontrolovat s odborným lékařem.

8 Demontáž opěrky na nohy

Stlačte obě bílé plastické přichytky umístěné po stranách opěrky na nohy a opěrku sejměte.

Nasednutí do kočárku

Přesvědčte se, že jsou ZAJIŠTĚNY obě parkovací brzdy.

Pro snadnější přístup můžete sundat opěrku na nohy.

Pokud možno, opřete kočárek zadní stranou o zeď nebo nějaký nepohyblivý předmět. Popřípadě vám může někdo pomoci kočárek držet, aby se nehýbal.

Neusazujete-li dítě do kočárku tak, že je vyzvednete, postupujte následovně. Srovnejte přední kola se zadními. Dítě postavte na zem tak, aby mělo nohy mezi předními koly, s jednou nohou mírně předsunutou, a mírně jej usaďte do sedačky. Dítě vám může pomoci tak, že se chytne za přední nohy kočárku.

Přípevněte ochranné popruhy a seříďte délku pásků. Řemen přes pás i bederní popruhy by měly těsně přiléhat. Nasadte zpět opěrku na nohy do vhodné výšky.

Všimněte si, jak se dítě rádo vozí. Spolupráce mezi obsluhou a dítětem snižuje riziko zranění při nasedání a manévrování.

Vysednutí z kočárku

Přesvědčte se, že jsou obě parkovací brzdy ZAJIŠTĚNÉ a opěrka na nohy sundaná.

Pokud možno, opřete kočárek zadní stranou o zeď nebo nějaký nepohyblivý předmět. Popřípadě vám může někdo pomoci kočárek držet, aby se nehýbal.

Srovnejte přední otočná kola se zadními koly a udělejte dítěti místo na nohy.

Rozeprňte svorku pásku a v případě potřeby rozeprňte i bederní popruhy.

Nevyndávejte-li dítě tak, že je vyzvednete, postupujte následovně. Dítě by se mělo chytit za přední nohy kočárku a mírně se předklonit. Položí obě nohy pevně na zem, s jednou nohou mírně předsunutou. Pak se postaví do vzpřímené polohy, případně mu můžete pomoci.

Technika tlačení kočárku

Naplánujte si cestu, přičemž vezměte v úvahu překážky, terén i vzdálenosti, které je třeba urazit.

Obsluha by měla kráčet rozumnou rychlostí a před provedením manévru dítě vždy upozornit.

Obsluha by měla mít kočárek stále pevně pod kontrolou a držet jej za obě držadla.

Vyhýbejte se nerovnému nebo měkkému povrchu. Není-li možné se takovému terénu vyhnout, je někdy snazší táhnout kočárek za sebou.

Když sjíždíte z příkrého svahu, může se dítě cítit bezpečněji, když kočárek táhnete za sebou.

“Litaci” dveře zdolávejte opačným postupem než obvykle - otevřete je zády a pak jimi protáhněte kočárek.

Jízda s kočárkem by měla být příjemným zážitkem pro obsluhu i pro dítě, za předpokladu, že je mezi nimi vzájemná důvěra a pochopení.

Přejíždění obrubníku

9

JAK SJET Z OBRUBNÍKU NEBO Z JEDNOHO SCHODU:

Najeďte předními koly na okraj obrubníku.

Pevně uchopte rukojeti, nakloňte kočárek dozadu a držte jej na zadních kolech.

Najeďte zadními koly k okraji obrubníku.

Sjeďte s kočárkem přes obrubník po zadních kolech.

Při přejíždění obrubníku nikdy nenaklánějte kočárek dopředu.

10

JAK NAJET NA OBRUBNÍK NEBO NA JEDEN SCHOD:

METODA Č. 1: Najeďte předními koly k obrubníku: Pevně uchopte rukojeti, nakloňte kočárek dozadu a položte přední kola nahoru na obrubník.

Popojeďte zadními koly až k obrubníku a zvedněte je nahoru na obrubník.

METODA Č. 2: Otočte kočárek opačně a najeďte zadními koly k obrubníku.

Pevně uchopte rukojeti, nakloňte kočárek dozadu a vytáhněte jej po zadních kolech nahoru.

Jízda po schodech

Dávejte přednost rampám a výtahům, pokud jsou k dispozici.

Pokud to jde, raději se schodům vyhněte. Nemáte-li jinou možnost než jít po schodech, zajistěte si pomoc alespoň jedné osoby.

Nepokoušejte se brát kočárek nahoru nebo dolů po schodech, pokud si vy i váš pomocník nejste jisti, že máte kočárek plně pod kontrolou a že jej unesete i s dítětem.

Během této operace musí obsluha i pomocník udržovat dobrou rovnováhu a kočárek pevně držet. Obsluha musí mít ruce stále pevně vsunuté v rukojetích.

Je-li třeba, zastavte a odpočiňte si.

11

PO SCHODECH NAHORU:

Najeďte s kočárkem oběma zadními koly k prvnímu schodu.

Nakloňte kočárek dozadu a vyjeďte na další schod.

Pomocník stojí vpředu, stabilizuje a nadzvedává kočárek, přičemž jej drží za přední rám (**ne za opěrku na nohy**).

Tímto způsobem pokračujte jeden schod po druhém až nahoru.

12

PO SCHODECH DOLŮ:

Najeďte oběma předními koly k okraji horního schodu.

Nakloňte kočárek dozadu a popojeďte s ním dopředu, až se dostanete zadními koly na kraj schodu.

Pomocník stojí vpředu, stabilizuje a nadzvedává kočárek, přičemž jej drží za přední rám (**ne za opěrku na nohy**).

Držte celou váhu kočárku a sjeďte zadními koly na nižší schod.

Tímto způsobem pokračujte jeden schod po druhém až dolů.

Po použití

Demontáž opěrky na nohy

13

- Stiskněte obě bílé plastické svorky umístěné po stranách opěrky na nohy
Vysuňte opěrku na nohy z položovacích koleček

Složení kočárku

14

- A Vytáhněte horní i dolní opěrku směrem nahoru
B Rozepněte OMF patentní svorky

Při skládání kočárku dávejte pozor, abyste si nepřivřeli prsty.

15

- C Uchopte rukojeť a zatlačte směrem dopředu.
D Svorka pro skladovací polohu musí zaklapnout.

Péče o kočárek


- Tento kočárek byl zkonstruován na základě vyspělých poznatků a při správném užívání a údržbě vám bude v pořádku sloužit po mnoho let.
- Pravidelně kontrolujte záklapky, brzdy, soustavu popruhů, přichytky, opěrku na nohy, spoje a upevnění, aby byla zajištěna jejich bezpečná a bezchybná funkce.
- Brzdy, kola a pneumatiky podléhají opotřebení a v případě potřeby by měly být za asistence opraváře uznaného dodavatelem kočárků vyměněny.
- Doporučujeme, aby kočárek každých 12 měsíců prohlédl uznaný opravář.
- Jestliže je kočárek poškozen nebo potřebuje-li opravu, uznaný opravář vám poskytne informace o tom, co je třeba provést. P řípadně můžete kontaktovat Oddělení služeb zákazníkům firmy Maclaren, kde obdržíte všechny požadované informace o tomto výrobku.
- Na tento kočárek by se měly používat náhradní díly a příslušenství výhradně od firmy Maclaren.
- Pokud jsou některé díly vašeho kočárku po čase špatně pohyblivé nebo se těžko ovládají, přesvědčte se, že to není z důvodu jejich znečištění, nastříkejte na ně slabou vrstvu maziva ve spreji, např. WD 40 (nepoužívejte olej ani mazací tuk). Dbejte na to, aby mazivo vniklo mezi součásti, ale nenastříkejte ho příliš, neboť by to mohlo usnadnit usazování nečistot. Nadměrný nános spreje setřete. Pravidelné mazání pohyblivých částí prodlouží životnost kočárku a usnadní jeho skládání a rozkládání.
- Ověřte si, že jste obeznámeni s obsluhou kočárku. Kočárek by měl jít vždy snadno rozložit i složit. Pokud ne, nedělejte to násilím - odložte jej a přečtěte si návod k použití.
- Plastikové a natěněné části můžete omýt teplou vodou a slabým čisticím prostředkem.
- Látku sedačky můžete očistit nebo vydrhnout pomocí slabého čisticího prostředku nebo slabého dezinfekčního prostředku.
- Nikdy nepoužívejte k čištění hrubé čisticí prostředky, roztoky s obsahem čpavku, bělicího prostředku nebo alkoholu.
- Jestliže byl kočárek vystaven působení vlhka, vytřete jej suchým hadrem a nechte jej úplně otevřený vyschnout v teplém prostředí.
- Neskládejte kočárek ani jeho příslušenství, když jsou mokré, ani je neuskładňujte na vlhkém místě. Mohla by se na nich vytvořit plíseň. Před uskladněním vždy všechny části do sucha vytřete.
- Kočárek skladujte na suchém a bezpečném místě.

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA:


Vycpaná sedačka
Sluneční stínítka
Zavazadlový prostor
Boční opěrky
Plachta proti dešti
Hrudní chránič
Nákupní taška

Firma Maclaren si vyhrazuje právo na změny v provedení kteréhokoli ze svých výrobků jako součást svého vývojového programu.


1

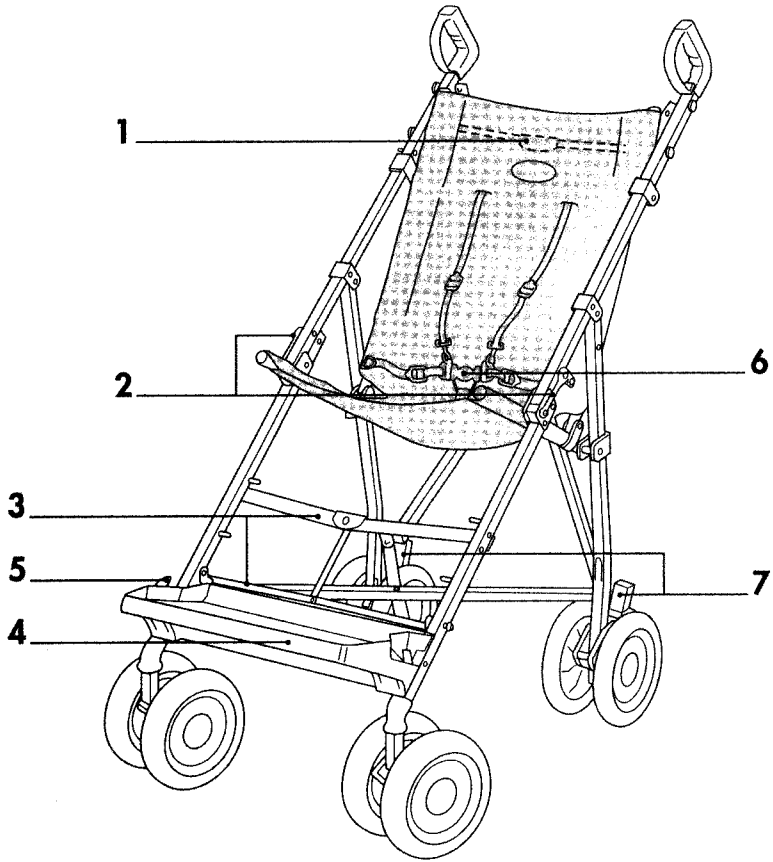


2

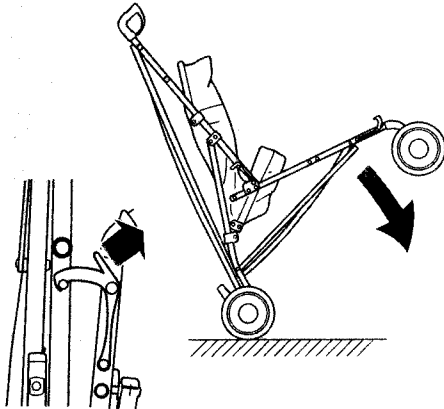


3

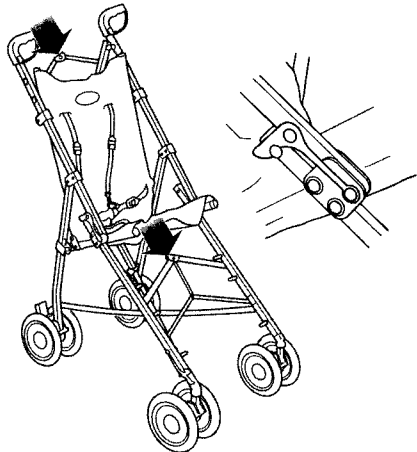


4

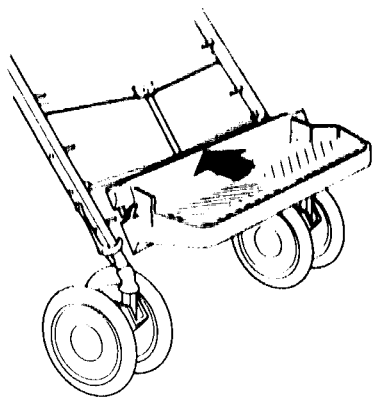


5

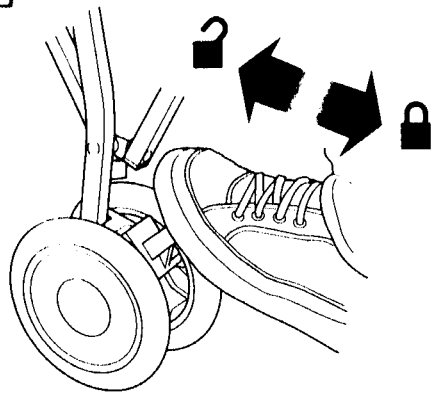


6

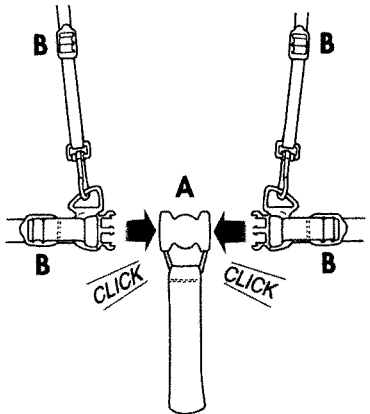


7

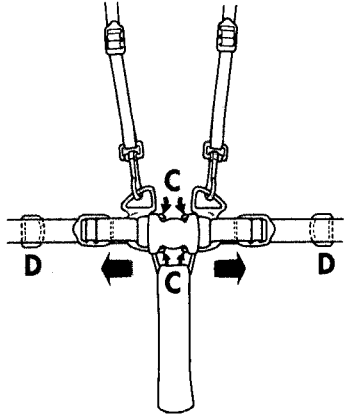



8

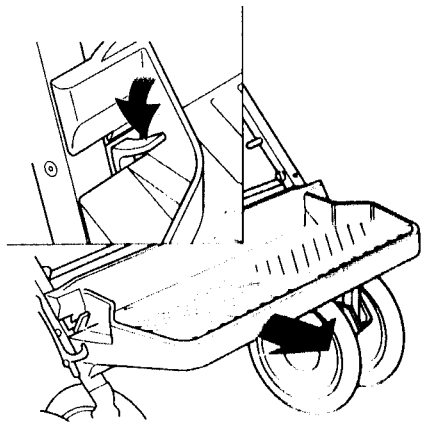

9

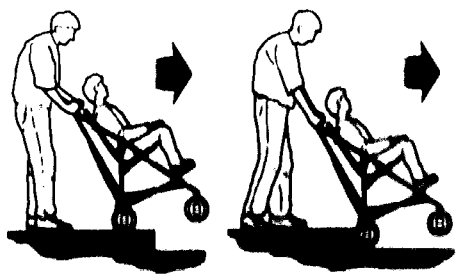

10

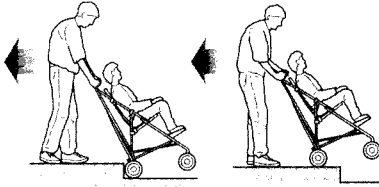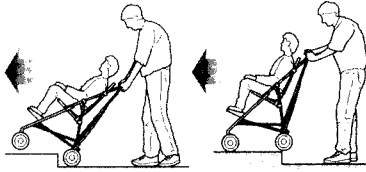


11




12



13

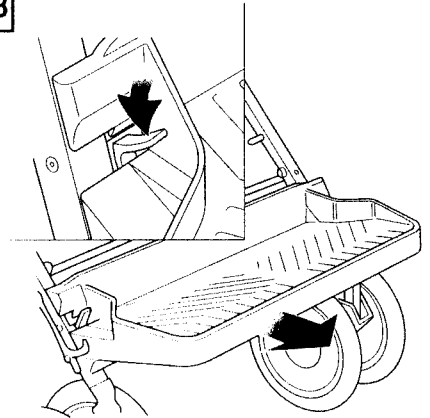

14

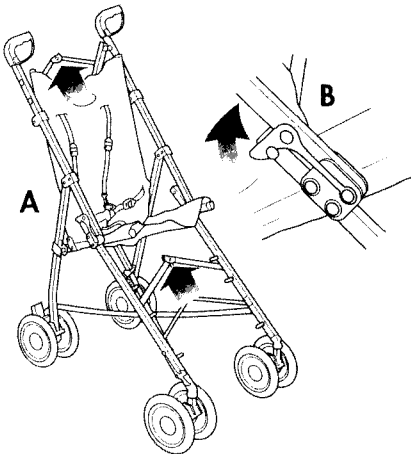

15

