

NÁVOD K POUŽITÍ

KŘESLO DO SPRCHY KLOZETOVÉ

588 FTB



CE

POUŽITÍ

Víceúčelové klozetové křeslo do sprchy je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní sprchu a standardní mísu WC. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Rám křesla je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn omyvatelným vyměkčeným sedátkem s hygienickým výřezem a odnímatelnou centrální částí, vyměkčenou opěrkou zad, plastovou toaletní nádobou s víkem ACC/5A, jednoduchou odklopnou stupačkou, odklopnými polstrovanými područkami a madly pro tlačení. Křeslo je dále vybaveno čtyřmi otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou opatřena nášlapnou brzdou. Model 4145 je vybaven rychloupínacími zadními poháněcími loukoťovými plnými koly s obručemi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška křesla: 101 cm

Šířka křesla: 64 cm

Hloubka křesla: 79 cm

Výška sedu: 54,5 cm

Šířka sedu: 47 cm

Hloubka sedu: 47,5 cm

Hmotnost křesla: 18,5 kg

Nosnost křesla: 190 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 190 kg.

Při skládání a rozkládání křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání křesla musí být všechna kola v kontaktu s podkladem.


Křeslo není určeno pro transport osob v exteriéru a jako náhrada transportního vozíku.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám křesla s kolečky, stupačku, dvě područky, polstrovaný sedák a opěrkou zad, plastové prkénko s výřezem a plastovou toaletní nádobu ACC/4.

SLOŽENÍ KŘESLA

Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky. Připevněte područky do otvorů A v zadní části rámu. Musíte současně zmáčknout pojistku 1. Sklopte područky a zasadte je do otvoru B. Opět je nutné uvolnit pojistku 2. Stejným způsobem lze područky odklopit a díky otočnému kloubu také složit za zádivou opěrku, aby nepřekážely.

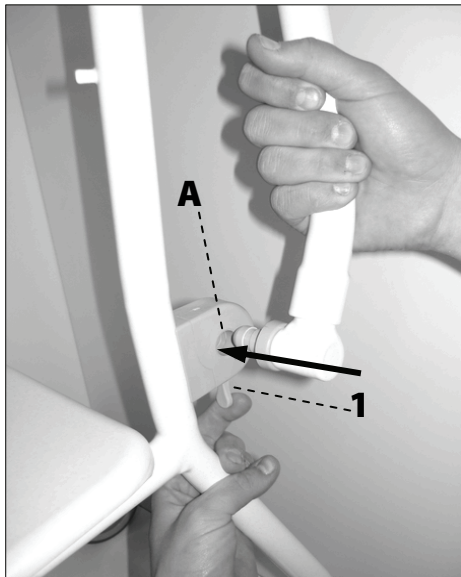

Nasazení područek 1

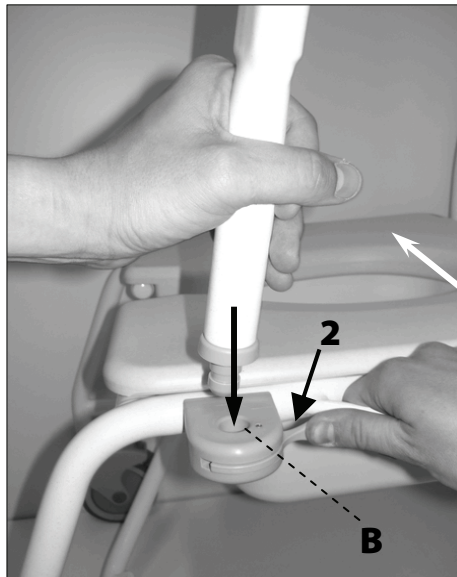


Nasazení područek 2




Nasazení područek 3

Nyní připevněte nacvaknutím „C“ pojistek 3 polstrovanou zádivou opěrku a položte polstrovaný sedák na plastové prkénko s výřezem. Pomocí kovového zobáčku 4 nasadte jednodílnou stupačku. Stupačka lze následně sklopit směrem nahoru. Nyní je křeslo připraveno k použití.

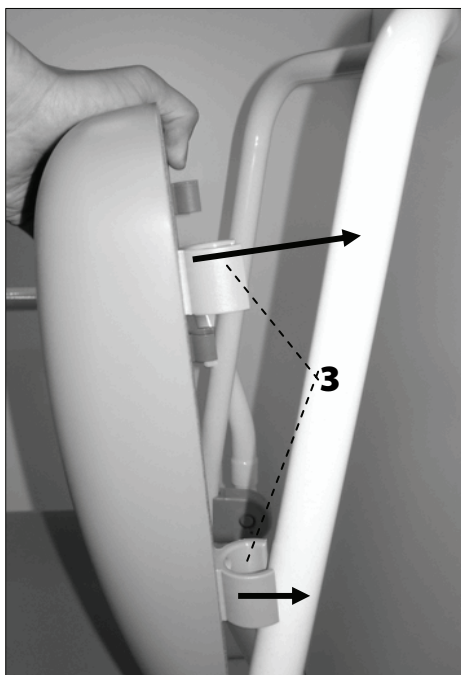

Nasazení zádivé opěrky

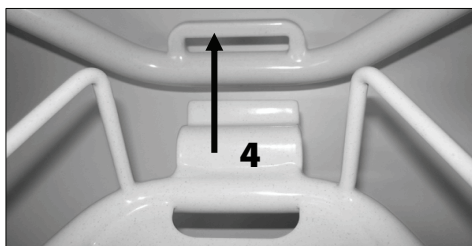

Nasazení stupačky



Sklopení stupačky

MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU

Toaletní plastovou nádobu lze vysunout/zasunout z držáků pod sedákem směrem dozadu.



Vysunutí/zasunutí plastové nádoby

ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu a stav všech jisticích prvků, koleček a brzd, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. Po každém použití nebo následném očištění křeslo řádně osušte.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.