


# NÁVOD K POUŽITÍ

MADLO ZÁCHYTNÉ

# 726

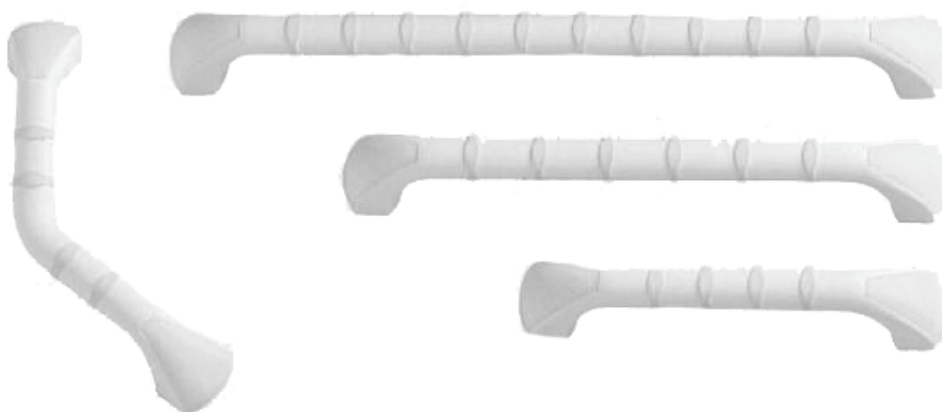

CE

## POUŽITÍ

Záchytné madlo tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen bez pomoci použít standardní vanu, sprchový kout, toaletu apod.. Madla usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech a zvyšuje vlastní soběstačnost.

## POPIS

Madlo je vyrobeno z vysoce odolného plastu s gumovou protiskluzovou úpravou a na obou stranách je zakončeno hlavicemi, které slouží pro uchycení madla do nosné konstrukce.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka

726 A: 30,5 cm

726 B, 568 B: 46 cm

726 C, 568 C: 64 cm

726 ANGLE: 33 cm (lomené)

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před instalací a používáním madla si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Po instalaci a před prvním použitím důkladně zkontrolujte a otestujte pevnost madla.

Před používáním madla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při upevňování madla k vaně postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Pro větší bezpečnost doporučujeme doplnit madlo protiskluzovou podložkou a stupínkem k vaně.

## UPEVNĚNÍ MADLA

Madlo se připevňuje čtyřmi šrouby do nosné konstrukce. Pro upevnění použijte samořezné šrouby 10x50 mm (3/16"x2") a hmoždinky zvolte podle druhu materiálu zdi, do které chcete upevnit madlo.

## ÚDRŽBA

Madlo lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění madlo řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat pevnost připevnění, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

