

NÁVOD K POUŽITÍ

ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ MATRACE S KOMPRESOREM

PA 5500



CE

a **DMA Praha s. r. o.**
Krajanská 339
149 00 Praha 4

a **Centrála – distribuce:**
Kunice 207
251 63 Strančice

e dmapraha@dmapraha.cz
w www.dmapraha.cz

t 323 664 465, 323 664 466,
323 664 355, 323 664 358

f 323 664 335


POUŽITÍ

Antidekubitní matrace tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů. Svým provedením umožňuje dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty.


POPIS

Kompresor s matrací PA 5500 používejte pro léčbu pacientů s **vysokým rizikem vzniku dekubitů**.

Střídavé nafukování a vyfukování komor matrace aktivně podporuje cirkulaci krve, redukuje tlak a zmírňuje bolest. Komory jsou nafukovány a vyfukovány ve třífázovém tří, pěti, deseti nebo dvacetiminutovém cyklu (tři zóny viz obr). V případě potřeby můžete využít také statický mód (**ST**).

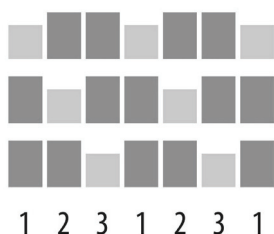

Na kompresoru lze individuálně nastavit tlak dle hmotnosti pacienta a je vybaven vizuálním indikátorem nízkého tlaku a alarmem!

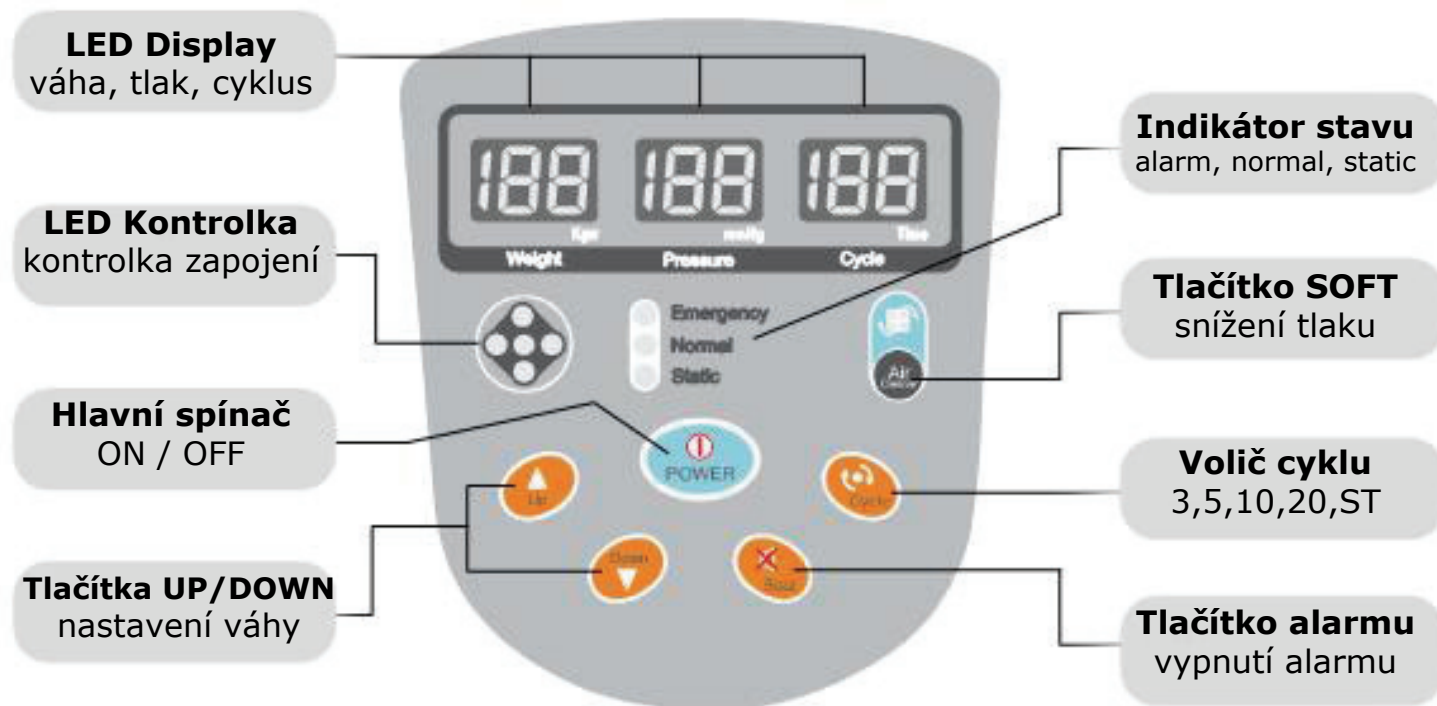

TECHNICKÉ PARAMETRY

MATRACE:

Rozměr: 86x190x12 cm (ŠxDxV)

Váha: 8,5 kg

Materiál komor: PVC

Počet aktivní komor: 13

Počet statických komor: 3

Maximální zatížení matrace: 140 kg

Příslušenství: CPR ventil, omyvatelný a paroprodyšný potah

PULZNÍ KOMPRESOR:

Napětí: 220 V, 50 Hz

Příkon: 10 W

Rozměr: 24x16x40 cm (ŠxHxV)

Váha: 3,5 kg

Tok vzduchu: 3-18 l/min

Tlak vzduchu: 30 - 120 mmHg

Doba cyklu: 3, 5, 10, 20 min + statický mód

Nastavení tlaku vzduchu: manuální

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním matrace si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním matrace konzultujte její vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Zkontrolujte vždy správné a stabilní umístění matrace.

Před použitím se přesvědčte, zda velikost matrace odpovídá velikosti ložné plochy lůžka.

Nepoužívejte matraci s kompresorem v blízkosti otevřeného ohně a hořlavých plynů.

V blízkosti matrace s kompresorem nekuřte.

V blízkosti matrace nesmí být ostré předměty.

Matrace je určena pouze pro jednoho pacienta.

Pro čištění používejte prostředky neobsahující rozpouštědla.

V průběhu používání matrace rošt nepolohujte.

Matrace je určena pouze pro ležící pacienty, nepoužívejte pro polohu v sedu.

Matrace s kompresorem nesmí být používána ke zvedání ležících pacientů.

Při používání kompresoru je možný vznik elektro-magnetické interference s jinými přístroji.

Pro zamezení zvyšte vzdálenost mezi přístroji.

Zabraňte působení moči na matraci.

Před čištěním kompresoru jej odpojte z elektrické sítě vytažením zástrčky napájení.

Okolní provozní teploty při používání matraci s kompresorem musí být v rozmezí 10 až 40 °C.

Nepoužívejte kompresor pro jiný typ matrace.

V případě nesprávného užívání může být kompresor pro uživatele nebezpečný. Opravu kompresoru může provádět pouze autorizovaný servis.

INDIKACE

Matrace jsou určeny k dlouhodobému používání pro pacienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů, škála NORTON <12.

PŘED POUŽITÍM

Před používáním matrace si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Vašeho dodavatele.

Vhodnost matrace vždy konzultujte s ošetřujícím lékařem.

Ujistěte se, že balení obsahuje všechny části, tj. matraci, kompresor, vzduchové hadice, a tuto uživatelskou příručku.

INSTALACE

Umístěte kompresor na pevný a rovný povrch nebo zavěste pomocí věšáku na čelo lůžka v místě nohou pacienta.

Matraci rozložte na rošt tak, aby vzduchové hadice byly v nožní části lůžka a vyrovnejte všechny záhyby.

Matrace musí být ve vodorovné poloze, vyvarujte se polohování roštu.

Napojte vzduchové hadice matrace do vývodů umístěných na boku kompresoru. Vzduchovou matraci umístěte na lůžku tak, aby vzduchové hadice směřovaly ke kompresoru.

Připevněte matraci k roštu pomocí popruhů ve spodní části, aby nedocházelo k posunu matrace.

Zapojte kompresor do elektrické sítě a zapněte spínač (**ON/OFF**), který je umístěn na čele přístroje. Po zapnutí kompresoru bude svítit kontrolka spínače (**POWER**) a kontrolka nízkého tlaku ve vzduchové matraci (**ABNORMAL**). Vyčkejte 20 minut a zkontrolujte, zda jsou vzduchové komory dostatečně nafouknuté.

Tlačítka **UP/DOWN** zvolte na kompresoru hmotnost pacienta (**WEIGHT**)

Zvolte hodnotu: 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 nebo 140 kg.

Tlačítkem **VOLIČ CYKLU** nastavte zvolenou délku cyklu - **3, 5, 10** nebo **20** minut. V případě potřeby můžete využít také statický mód (**ST**).

V momentě, kdy zhasne indikátor nízkého tlaku (**ABNORMAL**) a rozsvítí se indikátor optimálního tlaku (**NORMAL**), je vzduchová matrace a kompresor připraven k používání.

V případě nutnosti okamžitého vypuštění matrace vytáhněte vzduchové hadice z kompresoru a uvolněte CPR ventil na matraci.

PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

Nenafukuje se matrace:

zkontrolujte hadice spojující kompresor a matraci, zda nejsou zaškrncené, zkontrolujte, zda je kompresor zapnutý a zapojený do elektrické sítě, zkontrolujte, zda není na matraci trhlina, pokud potíže přetrvávají, kontaktujte svého dodavatele.

Nefunguje kompresor:

zkontrolujte, zda je kompresor zapnutý a zapojený do elektrické sítě, pokud potíže přetrvávají, kontaktujte svého dodavatele.

Nesvítí některá z kontrolek u kompresoru:

zkontrolujte, zda má kontrolka svítit v dané pracovní fázi, zkontrolujte, zda je kompresor zapnutý a zapojený do elektrické sítě, pokud potíže přetrvávají, kontaktujte svého dodavatele.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě vyšší než 10°C. Pokud byla matrace v prostředí s teplotou nižší než 10°C, nechejte ji před použitím nejméně 60 minut při pokojové teplotě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Na čištění používejte běžné čisticí prostředky (mýdlo nebo saponát), nepoužívejte vysoce agresivní přípravky a rozpouštědla.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Matraci ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

BEZPEČNOST

Matrace vyhovují všem standardním protipožární normám.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

POZNÁMKY

