

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁSTAVEC NA WC

575



CE

POUŽITÍ

Nástavec na WC je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS

Nástavec je vyroben z odolného plastu. Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, je tento plastový nástavec ve spodní části vybaven dvěma vymešovými patkami, které fixují polohu nástavce proti posunutí. K nastavení bočních vymešovacích patek slouží jistící matice. Model Deluxe je navíc vybaven poklopem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výška nástavce: 10 cm

Nosnost: 190 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním nástavce si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním nástavce konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Nástavec nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 190 kg.


Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jistících prvků.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části nástavce, tj. nástavec a aretační matice s patkami (výška 10 cm).

PŘIPEVNĚNÍ NÁSTAVCE

Nasadte nástavec na mísu tak, aby byl v co nejtěsnějším kontaktu s mísou a maticemi (A) dotáhněte boční vymešovací patky (B), tak aby se nástavec nemohl posunout.

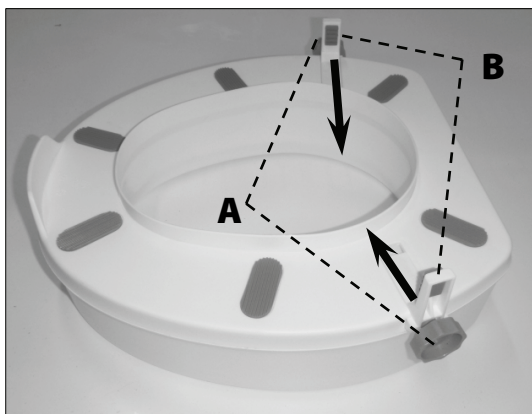

ÚDRŽBA

Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizací (1min - 85°C).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

