

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

### SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

### ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození.

**Varování!** Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku poskytované záruky.

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

PODLOŽKY ANTIDEKUBITNÍ



*Abdukční klín:*

*P 910*



---

Vzhledem k neustále snaze o zdokonalení výrobků si firma DMA Praha s. r. o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

*DODAVATEL :*

---

**DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, 149 00 Praha 4**  
**Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice**  
**tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335**  
***www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz***

## POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Abdukční klín P910 je určen k zafixování dolní končetiny v mírně abdukční poloze, čímž zajišťuje optimální polohu kyčelního kloubu. Je tak velmi vhodnou pomůckou k polohování pacienta, kde je třeba vyvarovat se současnému nežádoucího pohybu dolní končetiny. Zároveň se používá k zabránění patologického addukčního postavení kyčelního kloubu. Svým provedením umožňuje dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je s klínem ve styku, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty. Klín je anatomicky předtvarován a je vyroben z vysoce odolné polyuretanové (PU) pěny. Klín je standardně dodáván s paroprodyšným, antialergickým, protiskluzovým a voděnepropustným ochranným potahem.

## APLIKACE

- Polohovací klín umístíte nad kolena mezi třísla a k nohám ho připevníte pomocí pásu na suchý zip (viz obr. 1 a 2).
- K polohování na lůžku je také možné připevnit klín pod kolena mezi lýtka (viz obr. 3). Máme-li klíny 2, můžeme současně využít obou variant upevnění.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

## VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- Ujistěte se, že je klín správně umístěn a připevněn (viz obr 1-3).
- Pro správnou funkci doporučujeme používat klín výhradně s originálním potahem.
- Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.
- Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění potahu, doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).
- Klín nedoplňujte o žádnou jinou podložku.
- Dbejte na to aby se mezi klín a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět. V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.
- Klín nepoužívejte k podkládání jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast dolní končetiny.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ROZMĚRY	VÁHA	MATERIÁL	OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÉ
	DxŠxV (cm)	(kg)	KLÍNU	TEPLOTNÍ ROZHRANÍ (°C)
P 910	24x7(16)x18 cm	0,3	vysoce odolný polyuretan	-5 - 45

## SKLADOVÁNÍ

Podložku skladujte v horizontální poloze.  
Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.  
Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

- Podložka:

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

- Potah:

Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění použijte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.