

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození.

Varování! Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku poskytované záruky.

Vzhledem k neustále snaze o zdokonalení výrobků si firma DMA Praha s. r. o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

PODLOŽKY ANTIDEKUBITNÍ



Podložky antidekubitní pod patu:

*P 901
P 902
P 903
P 904*



CE

DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, 149 00 Praha 4
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ


Antidekubitní podložky paty P901, P902, P903 a P904 jsou velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů v oblasti paty. Svým provedením umožňují dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou nohy. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s antidekubitní podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty. Podložky jsou anatomicky předtvarovány a jsou vyrobeny z vysoce odolné viskoelastické polyuretanové (PU) pěny s paměťovým efektem. Podložky jsou standardně dodávány s paroprodyšným, antialergickým, protiskluzovým a voděnepropustným ochranným potahem.

APLIKACE

- Nohu položte na podložku způsobem, který je znázorněn na obrázku (1-3).
- Pata by vždy měla spočívat v předtvarovaném otvoru (A) a Achillova šlacha v drážce pro ní určené (A).
- U modelu P901 navíc nohu obtočte okrajovými částmi (1-4) a podložku k ní připevněte pomocí tří pásek (4,5).



Obr. 1 (P 901)

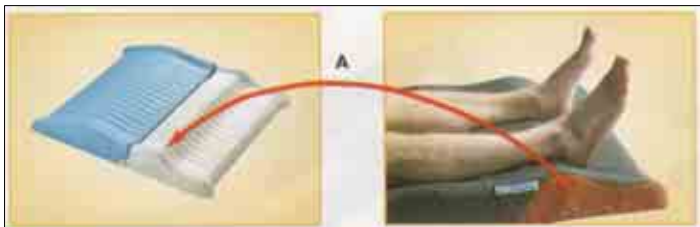

Obr. 2 (P 902)



Obr. 3
(P 903, P904)

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- Ujistěte se, že je noha v podložce ve správné poloze (viz obr 1-3).
- Pro správnou funkci doporučujeme používat podložku výhradně s originálním potahem.
- Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.
- Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění potahu, doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).
- Podložku nedoplňujte o žádnou jinou podložkou.
- Dbejte na to aby se mezi podložku a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět. V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.
- Podložku nepoužívejte k podkládání jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast paty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ROZMĚRY DxŠxV (cm)	VÁHA (kg)	MATERIÁL PODLOŽKY	OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÉ TEPLTNÍ ROZHRANÍ (°C)
P 901	50x24x5	0,5	viskoelastický polyuretan	-5 - 45
P 902	70x62x10	3	viskoelastický polyuretan	-5 - 45
P 903	63x24x32	1,5	viskoelastický polyuretan	-5 - 45
P 904	50x23x16	1,5	viskoelastický polyuretan	-5 - 45

SKLADOVÁNÍ

Podložku skladujte v horizontální poloze.

Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

- Podložka:



Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

- Potah:



Perte maximálně na 90°C (P904 na 40°!!!) . Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění používejte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.