

NÁVOD K POUŽITÍ

PODLOŽKA PRO PŘESUN

EZ 250



CE

POUŽITÍ

Podložka pro přesun je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen se sám přesunout nebo změnit polohu. Svou konstrukcí eliminuje možné riziko pádu při přesunu a výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem.

POPIS

Svým provedením podložka ulehčuje přesun a manipulaci s pacientem na lůžku, z lůžka na lůžko, sprchový vozík, operační stůl apod.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry ($\pm 3\%$): 50x60 cm (nesloženo)

Hmotnost. 0.45kg

Nosnost: 150 kg

POUŽITÍ

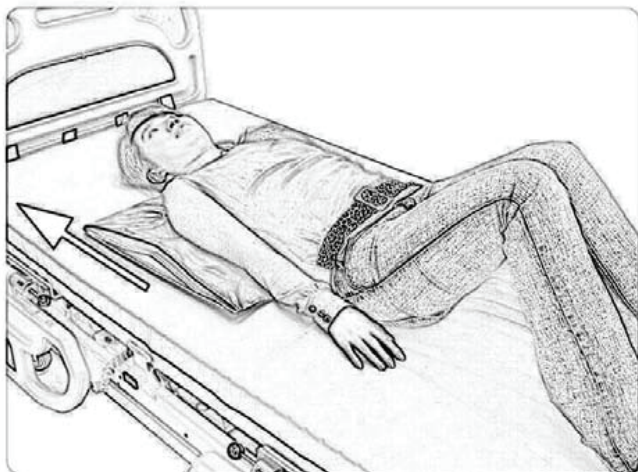


Lze použít pod rameny pro posun pacienta na lůžku.



Lze použít pod kyčle a kostrč pro přesun pacienta do strany.



Lze použít pro přesun pacienta z vozíku na vozík

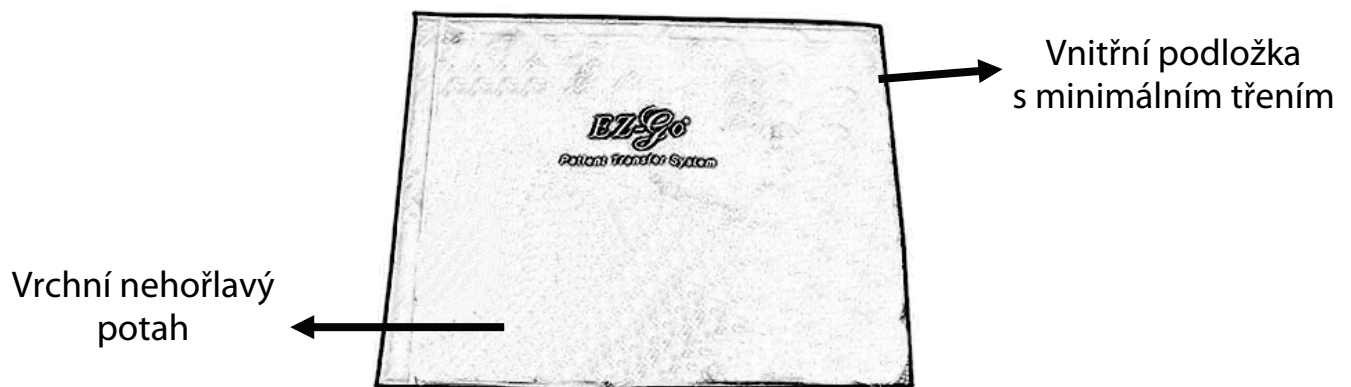

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním podložky si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním podložky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci s podložkou postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Pro správnou funkci doporučujeme používat podložku výhradně s originálním potahem.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění potahu, doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).

Podložku nedoplňujte o žádnou jinou podložku.

Dbejte na to, aby se mezi podložku a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět.

V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

Podložku používejte výhradně pro účely, k jakým je určena.

Před použitím se ujistěte, zda obě plochy, mezi kterými budeme pacienta přesunovat, jsou stabilní, zabrzděné a ve vodorovné poloze.

Během přesunu pacienta dbejte zvýšené pozornosti na jeho vlasy. Ty by měly spočívat vždy na vrchní straně podložky, aby nedošlo k jejich nechtěnému zarolování.

Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 150 kg.

SKLADOVÁNÍ

Podložku skladujte v horizontální poloze.

Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

ÚDRŽBA

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty. Podložku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro standardní čištění omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě. Nesterilizujte při vysokých teplotách.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.