

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na poškození vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození.

Varování! Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku poskytované záruky.


NÁVOD K POUŽITÍ ZP

PODLOŽKY ANTIDEKUBITNÍ



*Podložka antidekubitní
gelová do vozíku typ:*

*Gel
Gel Percé*

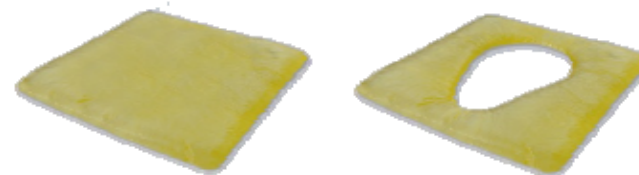

DODAVATEL :

**DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, 149 00 Praha 4
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335**

Vzhledem k neustále snaze o zdokonalení výrobků si firma DMA Praha s. r. o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

Antidekubitní podložky Gel a Gel Perce jsou velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů v oblasti hýždí. Svým provedením umožňují dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s antidekubitní podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty. Podložky jsou vyrobeny z vysoce odolného vyskoelastického gelu. Podložky jsou standardně dodávány s paroprodyšným, antialergickým, protiskluzovým a voděnepropustným ochranným potahem.

INDIKACE

Podložka je určena k dlouhodobému používání pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku dekubitů.

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

- Před použitím se přesvědčte zda velikost podložky odpovídá velikosti sedací plochy vozíku.
- Podložku umístěte na vozík tak, aby protiskluzová část potahu byla dole a úchyt na potahu vpředu.
- Podložka by měla být umístěna pouze na vodorovnou plochu.
- Pro správnou funkci doporučujeme používat podložku výhradně s originálním potahem.
- Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.
- Pokud dojde ke kontaminaci či jinému znečištění obalu doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).
- Důsledně dbejte na to aby se mezi podložku a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět. V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.
- Podložku nepoužívejte k podkládání jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast hýždí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ŠxHxV (cm)	VÁHA (kg)	MIN.EFEKTIVNÍ ZATÍŽENÍ (kg)	OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÉ TEPLTNÍ ROZHRANÍ (°C)
Gel	40x40x2,5 43x43x2,5 45x42x2,5	4,2	70	-5 - 45
Gel Perce	40x40x2,5	3,5	70	-5 - 46

SKLADOVÁNÍ

Podložku skladujte v horizontální poloze.
Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.
Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

- Podložka: 

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

- Potah: 

Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění použijte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.