


# NÁVOD K POUŽITÍ

ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKA DO VOZÍKU

# LATEX

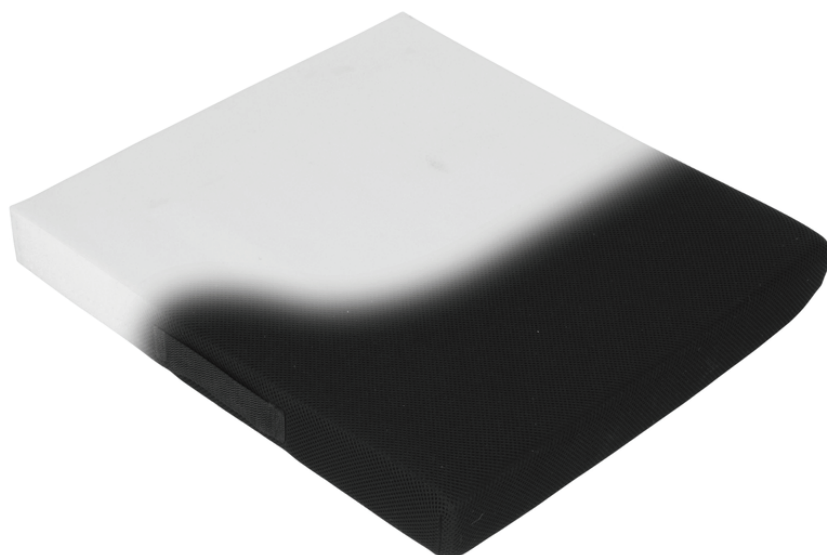

CE

## POUŽITÍ

Antidekubitní podložka do vozíku tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů v oblasti hýždí. Svým provedením umožňuje dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty.

## POPIS

Podložka je složena z vysoce odolné vyskoelastické pěny o objemové hmotnosti 80 kg/m<sup>3</sup> a je standardně dodávána s elastickým mikrovláknovým, antialergickým, protiskluzovým ochranným potahem z 3D tkaniny Tebox. V případě potřeby lze objednat s omyvatelným prodyšným potahem pro inkontinentní pacienty Techmaflex T 116 s nehořlavým polyuretanovým zátěrem. Spodní strana je z protismykové tkaniny Vinytol.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ŠxHxV (cm)	OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÉ TEPLOTNÍ ROZHRANÍ (°C)	MIN/MAX EFEKTIVNÍ ZATÍŽENÍ (kg)
LATEX	39x42x5	-5 – 46	± 30 / ± 80
	42x42x5	-5 – 46	± 30 / ± 100
	45x42x5	-5 – 46	± 40 / ± 110
	48x42x5	-5 – 46	± 40 / ± 130
	51x42x5	-5 – 46	± 40 / ± 150
	56x42x5	-5 – 46	± 60 / ± 150

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

### Pěnové jádro:

vytáhnout vysavačem, případně lehce omýt houbičkou namočenou v mýdlové vodě, potom omýt lehce čistou vodou.

### Potah:

*Tebox*: prát do 40 °C, žehlit do 100 °C, nesusit v bubnové sušičce, chemické čištění

*Techmaflex*: prát do 95 °C, možno dezinfikovat běžnými dezinfekčními roztoky, nepoužívat aviváž, sušit v otevřeném a větraném prostředí.

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním podložky si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním podložky konzultujte její vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Zkontrolujte vždy správné a stabilní umístění podložky.

Před použitím se přesvědčte, zda velikost podložky odpovídá velikosti sedací plochy vozíku.

Podložku umístěte na vozík tak, aby protiskluzová část potahu byla dole a úchyt na potahu vepředu.

Podložka by měla být umístěna pouze na vodorovnou plochu.

Pro správnou funkci doporučujeme používat podložku výhradně s originálním potahem.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci či jinému znečištění obalu doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).

Důsledně dbejte na to, aby se mezi podložku a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět - v případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

Podložku nepoužívejte k podkládání jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast hýždí.

## **SKLADOVÁNÍ**

Podložku skladujte v horizontální poloze.

Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody. Podložku je možné předat k recyklaci (informovat výrobce).

## **SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.