


NÁVOD K POUŽITÍ

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

POLYMULTI

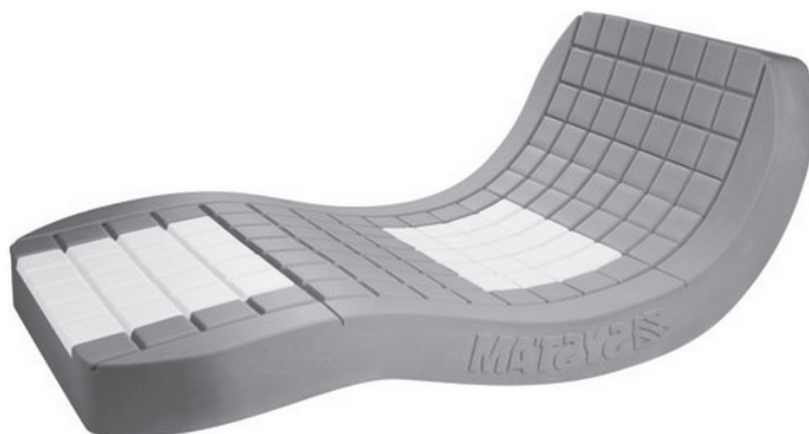

CE

POUŽITÍ

Antidekubitní matrace tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii dekubitních vředů (proleženin). Svým provedením umožňuje dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného vahou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé tělesné teploty.

POPIS

Matrace je složena z vysoce odolné polyuretanové (PU) pěny, která automaticky přizpůsobuje svůj tvar namáhaným částem těla. Navíc je vybavena dvěma vyměkčenými částmi z viskoelastické pěny s pamětí v oblasti kostrče a pat. Matrace je standardně dodávána s paroprodyšným, protiskluzovým, omyvatelným ochranným snímatelným potahem.

UPOZORNĚNÍ

Pro maximální efekt a opravdu účinnou prevenci je nutné pacienta na matraci pravidelně polohovat a měnit jeho pozici nejméně každé tři hodiny.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	ŠxHxV (cm)	MIN.EFEKTIVNÍ ZATÍŽENÍ (kg)	MAX. EFEKTIVNÍ ZITÍŽENÍ (kg)	OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÉ TEPLOTNÍ ROZHRANÍ (°C)
POLYMULTI	87x198x14	35	130	-5 – 50

INDIKACE

Matrace jsou určeny k dlouhodobému používání pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů, **NORTON 16-14**.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním matrace si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním matrace konzultujte její vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Zkontrolujte vždy správné a stabilní umístění matrace.

Před použitím se přesvědčte, zda velikost matrace odpovídá velikosti ložné plochy lůžka.

Matraci umístěte na rošt tak, aby protiskluzová část potahu dole.

Zkontrolujte, zda vyměkčená bílá část z paměťové pěny je umístěna pod patami (viz obrázek na boku potahu).

Matrace by měla být umístěna pouze na vodorovnou plochu.

Pro správnou funkci doporučujeme používat matraci výhradně s originálním potahem.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci či jinému znečištění potahu, doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za potah náhradní (nutno zakoupit zvlášť).

Důsledně dbejte na to, aby se mezi matrací a kontaktní částí pokožky nedostal žádný cizí předmět - v případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

SKLADOVÁNÍ

Matraci skladujte v horizontální poloze.

Matraci nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.

Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte matraci na suchém a teplém místě.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

Matrace: 

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

Potah: 

Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění použijte rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Matraci ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

BEZPEČNOST

Matrace vyhovují všem standardním protipožárním normám.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.