


# NÁVOD K POUŽITÍ

RAMPA PŘEJEZDOVÁ

# TRP-DB

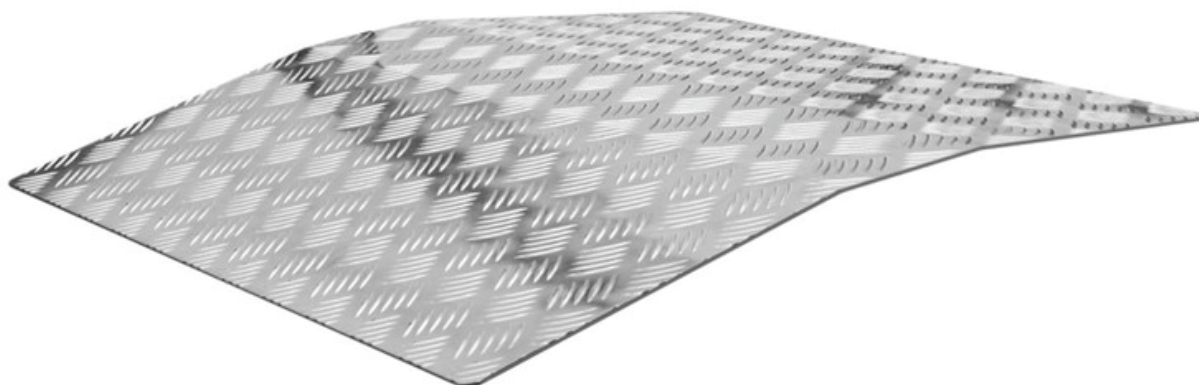

CE

## POUŽITÍ

Přejezdové rampy tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Ulehčují překonání menší nerovnostní bariéry, jakou je např. obrubník, práh, menší schod apod.

## POPIS

Lehká a skladná duralová konstrukce je vybavena protiskluzovým povrchem a umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka: 50 cm (DB5), 77 cm (DB7)

Šířka: 70 cm

Výška: 5,5 cm

Hmotnost: 3.8 kg (DB5), 6.8 kg (DB7)

Nosnost: 250 kg

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním ramp si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Při manipulaci s rampou postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Nepřekračujte maximální nosnost ramp 250 kg.

## OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny díly rampy.

## INSTALACE RAMPY:

Položte rampu přes překážku, která by neměla přesáhnout 5,5 cm. Ujistěte se, zda je rampa stabilní a při najetí se její nejvyšší část dotýká překážky.



**ÚDRŽBA**

Rampy lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jistících prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

**SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.