


NÁVOD K POUŽITÍ

RAMPA PŘEJEZDOVÁ

TRP-DM

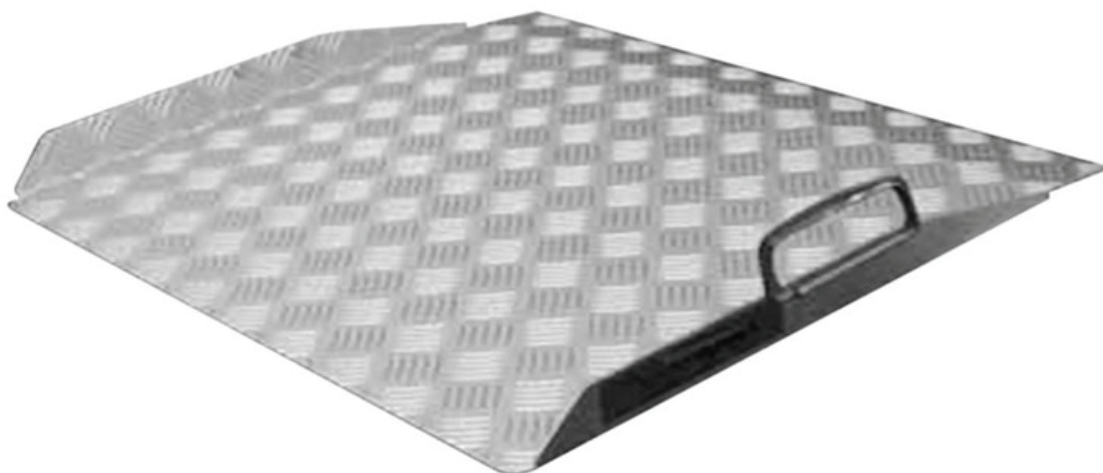

CE

POUŽITÍ

Nájezdové rampy tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Ulehčují překonání menší nerovnostní bariéry, jakou je např. obrubník, práh, menší schod apod.

POPIS

Lehká a skladná duralová konstrukce je vybavena protiskluzovým povrchem a sklopným madlem, které umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka: 60 cm (DM6), 100 cm (DB10)

Šířka: 70 cm

Hmotnost: 3.8 kg (DB6), 6.8 kg (DM10)

Nosnost: 250 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním ramp si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Při manipulaci s rampou postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Nepřekračujte maximální nosnost ramp 250 kg.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny díly rampy.

INSTALACE RAMPY:

Položte rampu na překážku tak, aby její vrchní část přesahovala překážku alespoň 5 cm a ujistěte se, zda je rampa stabilní. Sklon rampy by neměl z bezpečnostních důvodů přesáhnout poměr 1:16.



ÚDRŽBA

Rampy lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.