

# NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA SKLOPNÁ DO SPRCHY

## 4261 G



CE

## **POUŽITÍ**

Sedačka do sprchy je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

## **POPIS**

Rám sedačky je vyroben z duralových trubek a je doplněn plastovým hygienickým sedátkem s výřezem pro intimní hygienu, konstrukcí pro uchycení sedačky ke zdi, kloubem, umožňujícím sklopení sedačky a opěrnou výškově nastavitelnou nohou snižujícím zatížení nosné konstrukce.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

Nastavitelná výška sedu: 44-51 cm

Šířka sedu: 44 cm

Hloubka sedu: 38 cm

Nosnost: 127 kg

Hmotnost: 3 kg

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním sedačky si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním sedačky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Sedačku nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 127 kg.

Při montáži a nastavování výšky sedačky postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Při užívání sedačky musí být obě nohy v kontaktu s podkladem.

Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

## **OBSAH BALENÍ**


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části sedačky, tj. sklopnou konstrukci rámu s opěrnou nohou a plastovou hygienickou sedačkou s výřezem.

## NASTAVENÍ VÝŠKY SEDU

Před připevněním sedačky ke zdi si vyměřte a nastavte požadovanou výšku sedu. Pro nastavení této výšky vytáhněte aretační „E“ pojistku (A), tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy a tím i výšku sedu. Pojistku zasuňte zpět. Tento postup opakujte i u druhé nohy.



Nastavení výšky sedu

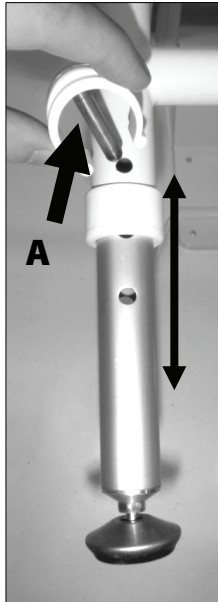

Aretační „E“  
pojistka

## MONTÁŽ SEDAČKY

Sedačka se připevňuje do sprchy šesti šrouby do nosné konstrukce. Pro upevnění použijte samořezné šrouby o průměru 10 mm a hmoždinky zvolte podle druhu materiálu zdi, do které chcete upevnit sedačku. Sedačka by měla být vodorovně.



Montáž sedačky ke zdi

**ÚDRŽBA**

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální funkčnosti a stability a funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu a stav všech jisticích prvků a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

**SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.