

NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA NA VANU

556



CE

POUŽITÍ

Sedačka na vanu je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou vanu. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Sedačka je vyrobena z odolného plastu, je vybavena dvěma posuvnými madly a je nastavitelná dle šířky vany pomocí bočních dorazových opěrek.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavení opěrek dle vnitřního rozměru vany: 54-72 cm

Velikost sedací plochy: 78,5x37 cm

Nosnost: 100 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním sedačky si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním sedačky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.


Sedačku nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 100 kg.

Při upevňování sedačky k vaně postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části sedačky, tj. sedačku, čtyři boční vymežovací opěrky s plastovými šrouby a dvě madla s plastovými šrouby.

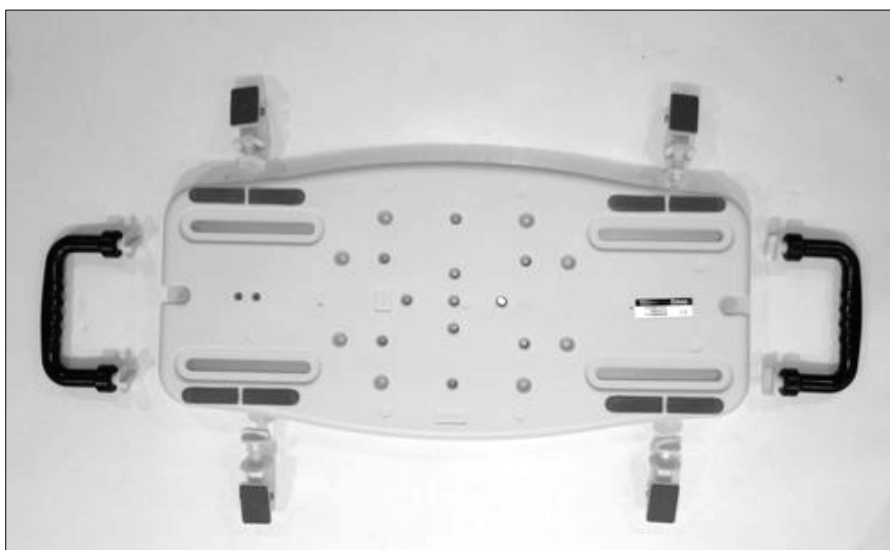


Obsah balení

SLOŽENÍ A INSTALACE SEDAČKY


Vyjměte z krabice všechny části sedačky. Pomocí přiložených plastových šroubů (1) připevněte dle potřeby obě nebo pouze jedno madlo (2) k sedačce. Madla lze dvousměrně posunout do zvolené polohy. Nyní připevněte pomocí přiložených plastových šroubů (3) všechny čtyři vymešovací opěrky (4). Opěrky lze dvousměrně posunout, nastavte je tedy dle vnitřní šířky vany a tuto polohu utažením zafixujte. Sedačku pak nasadte na vanu nejprve na jedné straně a následně na straně protilehlé. Zkontrolujte, zda je sedačka pevně ukotvena a nehýbe se ani po zatížení. Pokud tomu tak není nebo naopak nelze-li sedačku nasadit, je zapotřebí upravit polohu opěrek a nasazení opakovat. Nyní je sedačka připravena k použití.

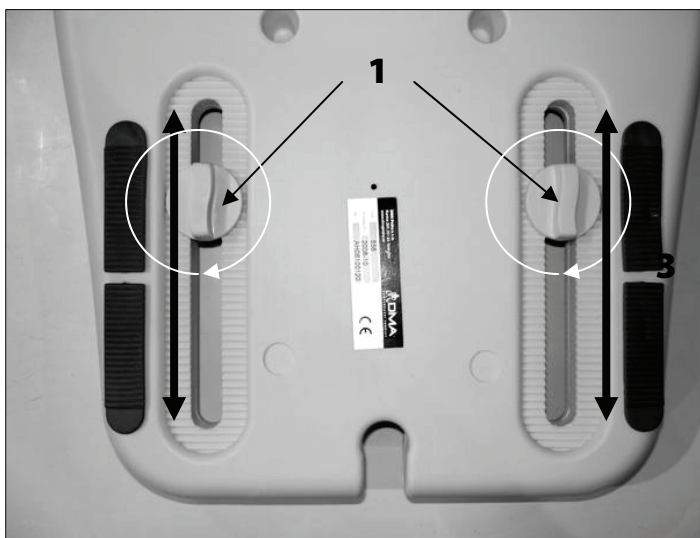


Připevnění madel

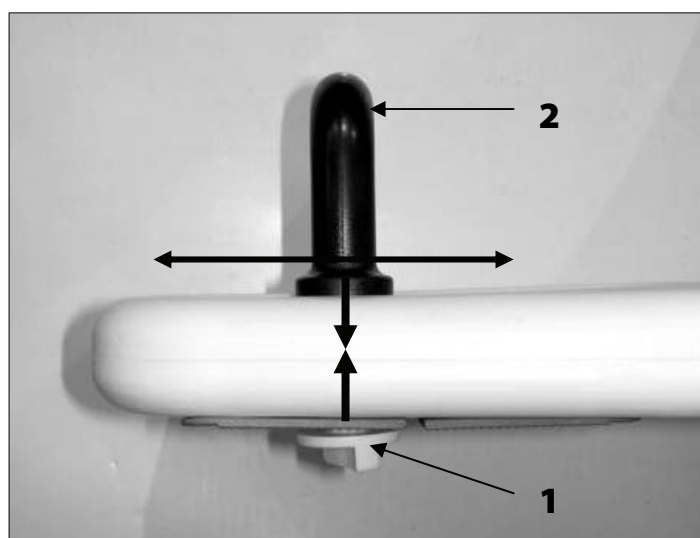

Nastavení madel

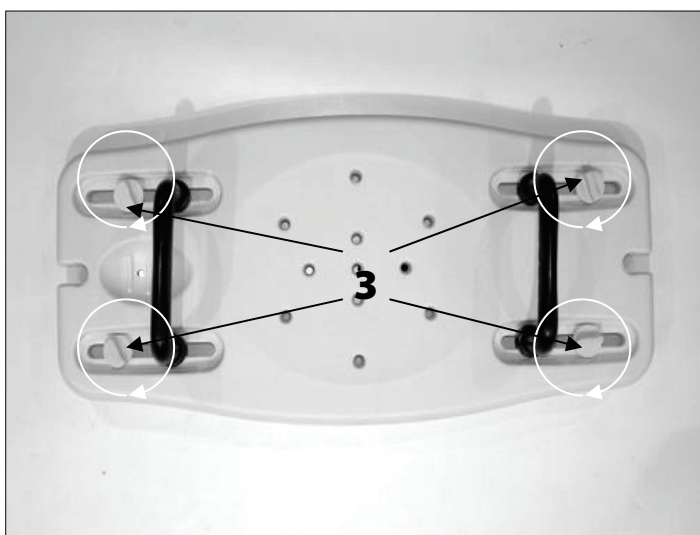

Připevnění vymešovacích opěrek

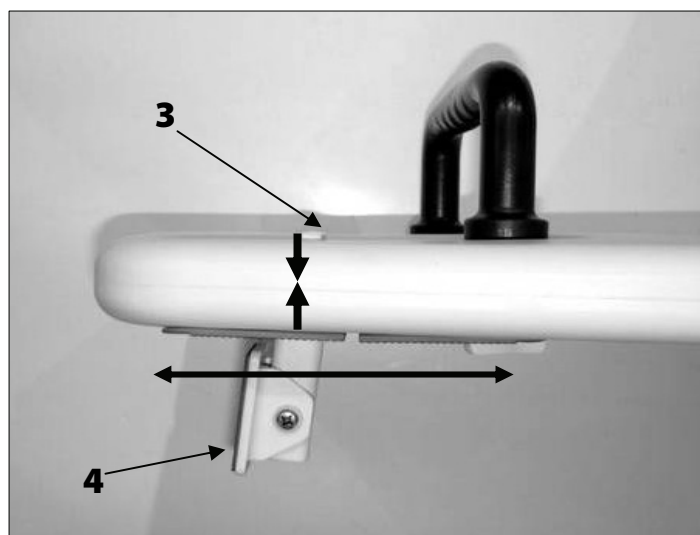

Nastavení vymešovacích opěrek

ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.