

# NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA DO VANY

## 559



# CE

## **POUŽITÍ**

Sedačka do vany je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou vanu. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

## **POPIS**

Vylehčená plastová konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a instalaci do vany. Je vybavena sedací plochou s otvory pro odtok vody. Ve spodní části je konstrukce sedačky doplněna čtyřmi protiskluzovými přísavkami, které zabraňují nežádoucímu posunutí po dně vany, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti.

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

Velikost sedací plochy: 45x29 cm

Výška: 15 cm (A), 20 cm (B), 30 cm (C)

Nosnost: 190 kg

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním sedačky si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním sedačky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Sedačku nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 190 kg.

Při upevňování sedačky do vany postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Před každým použitím se přesvědčte, zda je sedačka suchá a jsou-li z ní odstraněny zbytky mýdla, popř. dalších toaletních nebo čistících prostředků.


Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.

## **OBSAH BALENÍ**


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části sedačky, tj. sedačku se čtyřmi protiskluzovými přísavkami.

## **INSTALACE SEDAČKY**

Vyjměte sedačku z krabice a přiložte ji na zvolené místo ve vaně a tlakem prostřednictvím přísavky (1) zajistěte její polohu a stabilitu. K uvolnění a zvednutí sedačky jsou jednotlivé přísavky opatřeny táhlem (2), po jehož odtažení přísavku uvolníte.

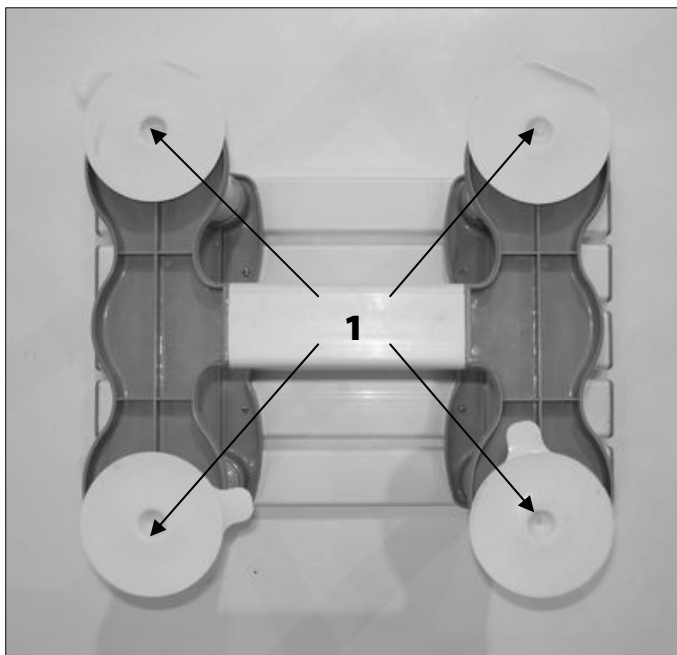

Protiskluzové přísavky

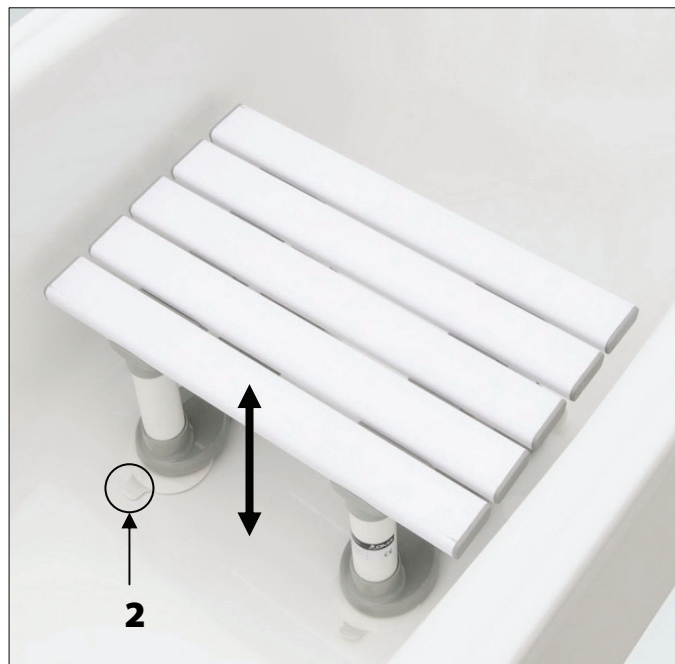

Táhlo k uvolnění protiskluzových přísavek

## ÚDRŽBA

Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

## ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

## UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

