

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY DO VANY



*Sedačka do vany závěsná
typ:*

*530 P
4244*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY DO VANY



*Sedačka do vany závěsná
typ:*

*530 P
4244*



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Sedačky do vany tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardní vanu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Jednoduchá konstrukce sedačky tvořená nastavitelným závěsným rámem, který je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek a sedací plochou, umožňuje snadnou manipulaci a výrazně usnadňuje instalaci do vany. Pro nastavení optimální polohy dle šířky příslušné vany je rám ve spodní části opatřen čtyřmi šrouby, po jejichž povolení lze ramena závěsného rámu jednotlivě vysunout nebo zasunout a po nastavení nově zvolené polohy opět zajistit jejich dotažením. Závěsná ramena jsou opatřena čtyřmi protiskluzovými koncovkami, které zabraňují nežádoucímu skluzu a posunu po obvodových stranách vany, na kterých je sedačka zavěšena, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti. Základní typ sedačky je dodáván ve dvou provedeních - s označením **530 P** a **4244** je sedačka dodávána s omyvatelným plastovým sedátkem.

Tabulka rozměrů :

Typ	Nastavitelná šířka (cm)	Sedací plocha (cm)	Nosnost (kg)
530 P	52 - 57	37 x 28	100
4244	48 - 65	40 x 22	100

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nepůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav přísavek! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluznou podložkou a madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Sedačky do vany tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardní vanu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Jednoduchá konstrukce sedačky tvořená nastavitelným závěsným rámem, který je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek a sedací plochou, umožňuje snadnou manipulaci a výrazně usnadňuje instalaci do vany. Pro nastavení optimální polohy dle šířky příslušné vany je rám ve spodní části opatřen čtyřmi šrouby, po jejichž povolení lze ramena závěsného rámu jednotlivě vysunout nebo zasunout a po nastavení nově zvolené polohy opět zajistit jejich dotažením. Závěsná ramena jsou opatřena čtyřmi protiskluzovými koncovkami, které zabraňují nežádoucímu skluzu a posunu po obvodových stranách vany, na kterých je sedačka zavěšena, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti. Základní typ sedačky je dodáván ve dvou provedeních - s označením **530 P** a **4244** je sedačka dodávána s omyvatelným plastovým sedátkem.

Tabulka rozměrů :

Typ	Nastavitelná šířka (cm)	Sedací plocha (cm)	Nosnost (kg)
530 P	52 - 57	37 x 28	100
4244	48 - 65	40 x 22	100

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nepůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav přísavek! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluznou podložkou a madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.