

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY DO VANY



*Sedačka do vany otočná
typ:*

536



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SEDAČKY DO VANY



*Sedačka do vany otočná
typ:*

536



DODAVATEL :

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POUŽITÍ : Sedačky do vany tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardní vanu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Otočná sedačka se skládá ze dvou samostatných částí - plastového hygienického sedátka, které je doplněno pevnými postranními madly a závěsného rámu vyrobeného z povrchově upravených ocelových trubek. Mechanické uložení sedátka umožňuje jeho plynulé otáčení, čímž se výrazným způsobem usnadňuje následná manipulace s pacientem. Pro fixaci zvolené polohy a dosažení maximální stability, lze otočnou sedací část prostřednictvím mechanické západky zajistit jednoduchým způsobem ve čtyřech pozicích, a to vždy po 90°. Boční ramena závěsného rámu jsou opatřena čtyřmi plastovými protiskluzovými koncovkami, které zabraňují nežádoucímu skluzu a posunu po obvodových stranách vany, na kterých je sedačka zavěšena, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti. Dále je zde stabilizační šroubovací vzpěra, která je zakotvena na vnitřních bočích vany. Celkové rozměry sedačky jsou navrženy tak, aby umožňovaly využití sedačky ve většině standardních van.

Typ 536: se dodává ve dvou variantách:

- a) s hygienickým výřezem v sedačce
- b) bez hygienického výřezu v sedačce.

Maximální zatížení : 100 kg

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nepůsobí mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav protiskluzových koncovek.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluznou podložkou a madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

POUŽITÍ : Sedačky do vany tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardní vanu. Svou konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Otočná sedačka se skládá ze dvou samostatných částí - plastového hygienického sedátka, které je doplněno pevnými postranními madly a závěsného rámu vyrobeného z povrchově upravených ocelových trubek. Mechanické uložení sedátka umožňuje jeho plynulé otáčení, čímž se výrazným způsobem usnadňuje následná manipulace s pacientem. Pro fixaci zvolené polohy a dosažení maximální stability, lze otočnou sedací část prostřednictvím mechanické západky zajistit jednoduchým způsobem ve čtyřech pozicích, a to vždy po 90°. Boční ramena závěsného rámu jsou opatřena čtyřmi plastovými protiskluzovými koncovkami, které zabraňují nežádoucímu skluzu a posunu po obvodových stranách vany, na kterých je sedačka zavěšena, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability a bezpečnosti. Dále je zde stabilizační šroubovací vzpěra, která je zakotvena na vnitřních bočích vany. Celkové rozměry sedačky jsou navrženy tak, aby umožňovaly využití sedačky ve většině standardních van.

Typ 536: se dodává ve dvou variantách:

- a) s hygienickým výřezem v sedačce
- b) bez hygienického výřezu v sedačce.

Maximální zatížení : 100 kg

ÚDRŽBA : Sedačku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nepůsobí mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav protiskluzových koncovek.

VAROVÁNÍ : Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluznou podložkou a madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o

ZÁRUKA : Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě.

