

NÁVOD K POUŽITÍ

STOLEK K LŮŽKU

CASA TABLE II



CE

POUŽITÍ

Stolek k lůžku tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Stolek se používá především jako doplněk pro pacienty upoutané na lůžko. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen používat standardní jídelní nebo pracovní stůl. Svoji konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony na lůžku a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Rám stolku je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti a je doplněn čtyřmi otočnými kolečky. Pracovní plocha je výškově a úhlově nastavitelná. Zarážka na spodním okraji desky podrží drobné věci i v nakloněné rovině. Konstrukce umožňuje zajet pod lůžko pouze z pravé strany.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nastavitelná výška: 77-101 cm

Rozměr pracovní desky: 62x45 cm

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním stolku si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním stolku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci nebo skládání postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části stolku, tj. základnu se čtyřmi kolečky a pracovní i odkládací desku.

NASTAVENÍ STOLKU:

Požadovanou výšku pracovní i odkládací desky nastavíte zmáčknutím aretační pojistky A. Ve zvolené poloze pojistku uvolněte. Úhel pracovní desky nastavíte do zvolené polohy pomocí zářžkového hřebenového mechanismu B. Pro vrácení desky zpět do vodorovné pozice, nastavte maximální možný úhel a po té desku sklopte.



Nastavení výšky pracovní a odkládací desky



Nastavení úhlu pracovní desky

ÚDRŽBA

Stolek lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech koleček, jisticích prvků a aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

