

NÁVOD K POUŽITÍ

VOZÍK MECHANICKÝ TRANSPORTNÍ

512 JBS



CE

POUŽITÍ

Transportní vozík je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin nebo s různým stupněm ochrnutí. Vozík slouží pro přepravu osob v interiéru i exteriéru.

POPIS

Skládací rám vozíku je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti, doplněn čtyřmi plnými kolečky, z nichž přední dvě mají uložení v otočné vidlici. Vozík je vybaven bowdenovými brzdami pro doprovod s možností aretace, nastavitelnými otočnými područkami, sklopnou stupačkou, bezpečnostním pásem a výškově nastavitelnými madly pro doprovod.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka vozíku: 53 cm

Hloubka vozíku: 89 cm

Výška madel pro doprovod: 130-140 cm

Šířka sedu: 33 cm

Hloubka sedu: 32 cm

Výška sedu: 50 cm

Hmotnost: 8,5 kg

Nosnost: 110 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním vozíku si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním vozíku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte vozík k sezení.

Vozík nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost je 110 kg.

Při skládání a rozkládání vozíku postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Je-li vozík v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání vozíku musí být všechny kola v kontaktu s podkladem.

Stupačka vozíku je určena pro oporu dolních končetin, nikdy na ní nestoupejte a nepřenášejte váhu celého těla.

Neprojíždějte s vozíkem měkký terén (tráva, písek, bahno...).

Vozík nepoužívejte na klzkém, kopcovitém nebo velmi hladkém povrchu.

Nezdolávejte s ním příliš vysoké překážky a strmě nakloněné roviny.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části vozíku (viz popis).


ROZLOŽENÍ VOZÍKU

Vybalte vozík z krabice a otevřete transportní tašku.


Vozík položte na podlahu, přidržete přední část sedačky a zvedejte zádovou opěrku dokud se aretační tyčka nezaklapne do zámků.




2-1

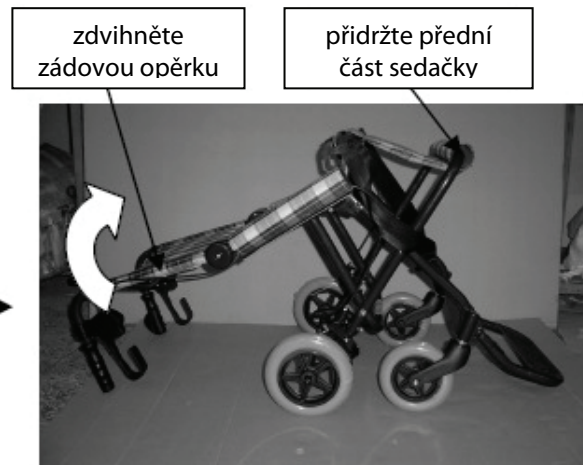

2-2

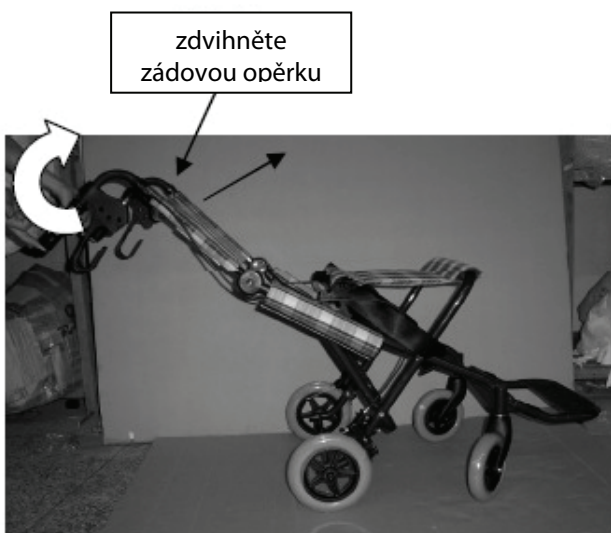


2-2

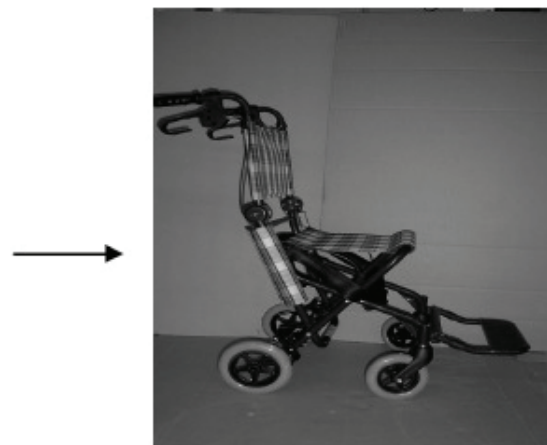

2-4




2-5

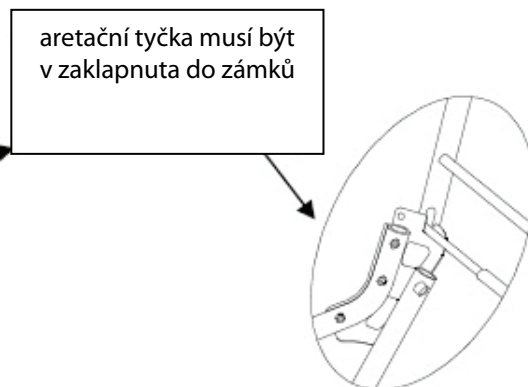

Upozornění: Před použitím vozíku se vždy přesvědčte, že je aretační pojistka v zámcích.

NASTAVENÍ PODRUČEK

Požadovanou výšku nastavte otáčením područky proti směru hodinových ručiček.

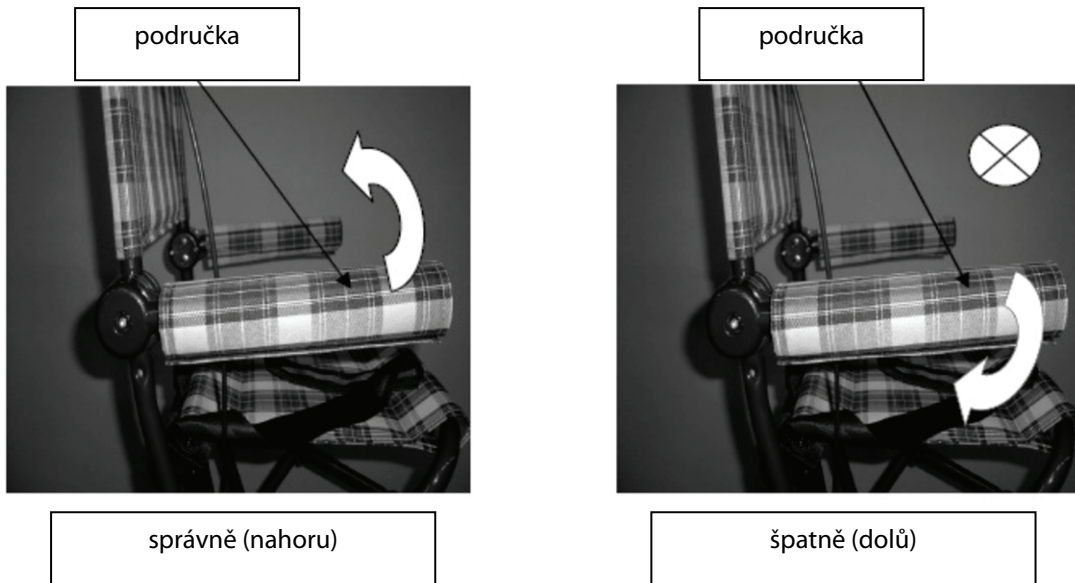


NASTAVENÍ VÝŠKY MADEL PRO DOPROVOD

Vysuňte aretační „E“ pojistky z trubek zádové opěrky.


Nastavte požadovanou výšku výsuvných madel pro doprovod.

Tuto polohu opět zafixujte aretační „E“ pojistkou.

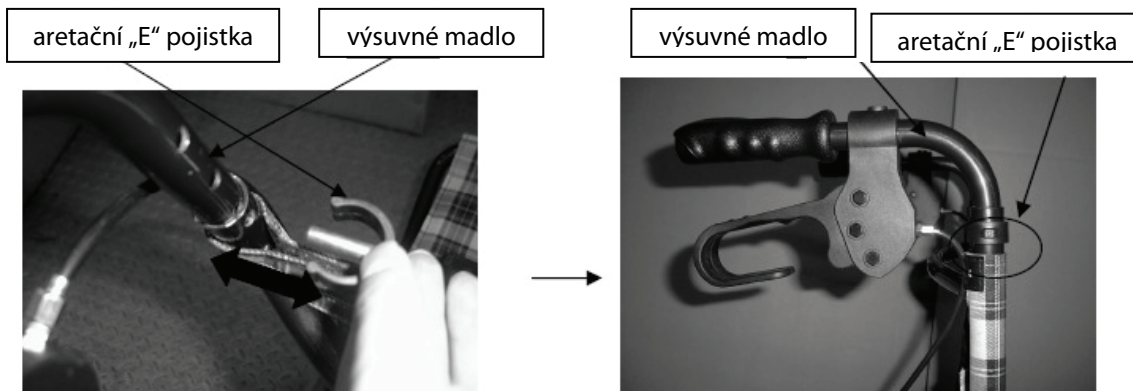


BRZDY


Vozík přibrzdíte stlačením brzdových pák směrem nahoru.

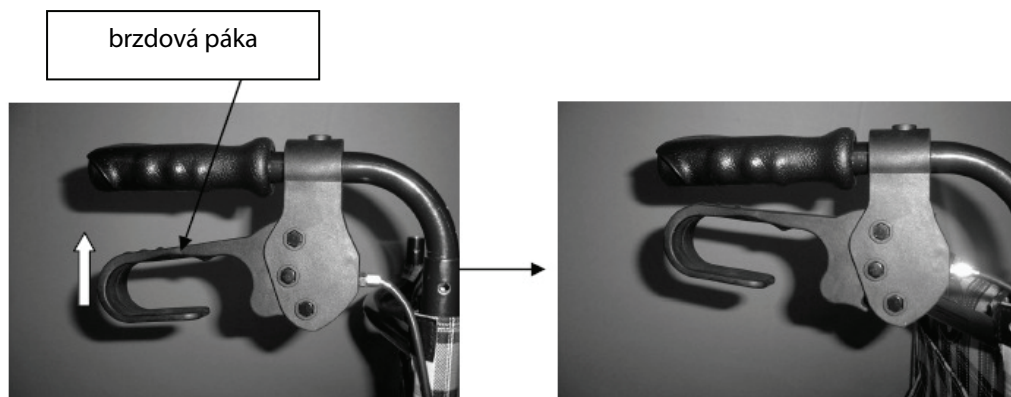

Při parkování vozík zabrzdíte pohybem brzdové páky směrem dolů. Tato pozice zůstane zaaretována. K odblokování stiskněte páku směrem nahoru.

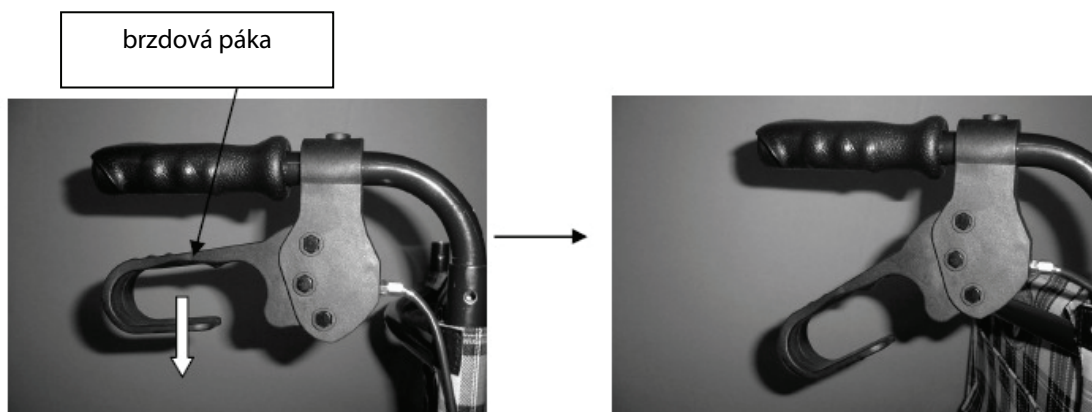**STUPAČKA**

Podle potřeby a využití můžete stupačku sklopit nebo odklopit.

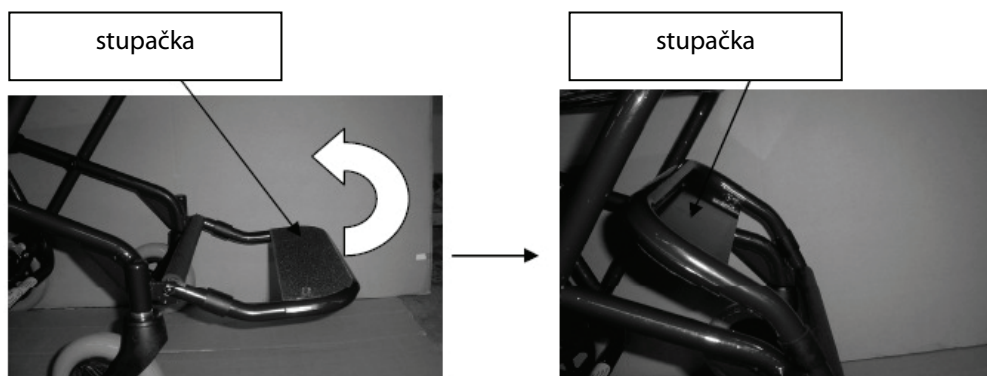

Upozornění: Při nasedání nebo vysedání z vozíku na stupačku nikdy nestoupejte, vozík by se mohl převrátit !

Při nasedání nebo vysedání z vozíku na stupačku nikdy nestoupejte, vozík by se mohl převrátit !



ÚDRŽBA VOZÍKU

Čalounění vozíku je možné čistit běžnými čistícími a dezinfekčními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Čistěte vždy celou plochu, kterou po odstranění nečistot důkladně opláchněte čistou vodou. Všechny kovové díly udržujte suché a čisté. Doporučujeme občas přeleštit vhodným leštícím prostředkem. Pravidelně kontrolujte všechny zajišťovací prvky (brzd, područek, stupaček, kol), abyste se ujistili, že jsou v bezpečném a provozuschopném stavu. Občasné lehké promazání (sprej WD-40) pohyblivých částí zaručí bezchybný a bezhlučný provoz. V případě důkladnější kontroly technického stavu nebo opravy, kontaktujte prosím naše servisní oddělení. Vozík skladujte v suchém a čistém prostředí, chraňte před prachem, vlhkostí a chemickými vlivy. Popsanou kontrolu doporučujeme provádět každý měsíc.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

