


# NÁVOD K POUŽITÍ

ZÁVĚSY KE ZVEDACÍM SYSTÉMŮM

## **1202 Basic, 1402 Deluxe 1602 Comfort, 1802 Dress**

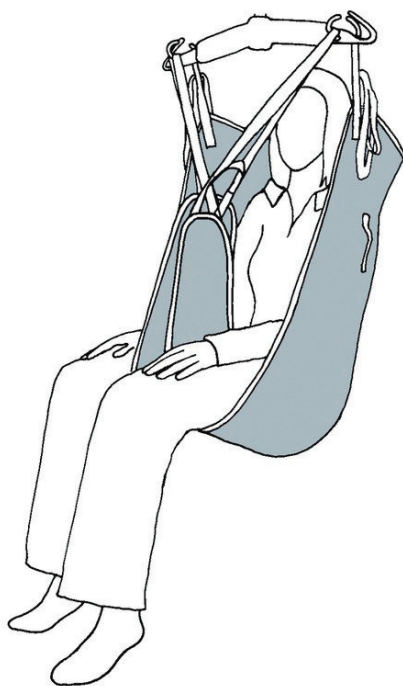

CE

## **POUŽITÍ**

Transportní závěsy ke zvedacím systémům tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen se sám přesunout nebo změnit polohu.

## **POPIS**

Ulehčuje přesun pacienta např. z lůžka na vozík, toaletní a sprchové křeslo, do vany a obráceně. Umožňuje a výrazně zjednodušuje také vykonávání hygieny a toalety. Vyrábí se ve třech velikostech S (<170 cm), M (170 – 190 cm), L (>190 cm) a jsou dodávány v polstrovaném nebo síťovém provedení (pouze typ 1402 Deluxe).

## **TECHNICKÉ PARAMETRY**

Nosnost: 190 kg

Materiál: Polyester

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Před používáním závěsu si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním závěsu konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při manipulaci se závěsem postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Pro správnou funkci doporučujeme používat závěs výhradně se zvedákem DMA 1006.

Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.

Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění závěsu, doporučujeme ho ihned vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).

Dbejte na to, aby se mezi závěs a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět.

V případě takového zjištění předmět ihned odstraňte.

Závěs používejte výhradně pro účely, k jakým je určena.

Před použitím se ujistěte, zda obě plochy, mezi kterými budeme pacienta přesunovat, jsou stabilní, zabrzděné a ve vodorovné poloze.

Před každým použitím překontrolujte všechny švy a transportní popruhy.

Před použitím zkontrolujte, zda jsou transportní popruhy bezpečně zavěšeny do hrazdy bez možnosti vyklouznutí.

Během přesunu pacienta dbejte zvýšené pozornosti na jeho hlavu, krční páteř a volné dýchací cesty.

Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 190 kg.

## POUŽITÍ

Aplikace závěsu na pacienta

### Vsedě:

- 1) Zasuňte závěs za pacientova záda, tak aby popruhy byly venku.
- 2) Toaletní otvor by měl být ve spodní části páteře a vrchní část je srovnána přes ramena. (Pro vycentrování použijte centrální úchyt na vnější části závěsu).
- 3) Opatrně nadzdvihněte pacientovu nohu, podvlečte pod ní polstrovanou nožní část závěsu a vytáhněte mezi pacientovými nohama. Jako prevenci dekubitů a diskomfortu zkontrolujte, zda závěs není pod nohou přehlý, zmačkaný nebo stočený. Tento postup opakujte také u druhé nohy.
- 4) Překřížte nožní popruhy a zavěste na hrazdu zvedáku (závěs 1202 Basic, 1602 Comfort, 1802 Dress).
- 5) Překřížte vnitřní nožní popruhy a zavěste je na hrazdu. Vnější nožní popruhy nepřekřížujte a zavěste je na hrazdu (pouze závěs 1402 Deluxe).
- 6) Na hrazdu zavěste také oba nepřekřížené ramenní popruhy.
- 7) zapněte pacientovi pás na suchý zip přes hrud' (pouze závěs 1802 Dress).

### Vleže:

#### 1) **Způsob A**

Zvedněte zádový díl lůžka a zasuňte závěs za pacientova záda, tak aby popruhy byly venku.

#### **Způsob B**

Otočte pacienta na bok a podložte pod něj napůl složený závěs. Pacienta položte zpět a z druhé strany vytáhněte druhou polovinu závěsu.

- 3) Toaletní otvor by měl být ve spodní části páteře a vrchní část je srovnána přes ramena. (Pro vycentrování použijte centrální úchyt na vnější části závěsu).
- 4) Opatrně nadzdvihněte pacientovu nohu, podvlečte pod ní polstrovanou nožní část závěsu a vytáhněte mezi pacientovými nohama. Jako prevenci dekubitů a diskomfortu zkontrolujte, zda závěs není pod nohou přehlý, zmačkaný nebo stočený. Tento postup opakujte také u druhé nohy.
- 5) Překřížte vnitřní nožní popruhy a zavěste je na hrazdu. Vnější nožní popruhy nepřekřížujte a zavěste je na hrazdu (pouze závěs 1402 Deluxe).
- 6) Na hrazdu zavěste také oba nepřekřížené ramenní popruhy.
- 7) zapněte pacientovi pás na suchý zip přes hrud' (pouze závěs 1802 Dress).

### POZNÁMKA:

Zavěsíte-li ramenní popruhy nakrátko a nožní popruhy nadlouho, bude pacient v závěsu sedět, vhodné tedy při přesunu do sedu. Chcete-li, aby pacient naopak ležel, zavěste popruhy obráceně, tedy ramenní nadlouho a nožní nakrátko. Vhodné při přesunu do lehu, např. do lůžka.

Pacienta zvedákem lehce nadzvedněte a závěs s popruhy řádně zkontrolujte a případně upravte tak, aby nebyl nikde překroucený nebo zmačkaný a pacienta nikde netlačil. Po důkladném zkontrolování můžete pacienta zvedat a přemísťovat.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Závěs ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

**ÚDRŽBA**

Nebělte a nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty. Podložku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro standardní čištění omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Závěs je možné prát do 80° C, Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě. Nesterilizujte při vysokých teplotách.

**SERVIS A OPRAVY**

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

**ZÁRUKA**

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

**UPOZORNĚNÍ**

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.