

NÁVOD K POUŽITÍ

ŽIDLE DO SPRCHY

550



CE

POUŽITÍ

Židle do sprchy je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.

POPIS

Skládací rám židle je vyroben z povrchově upravených duralových trubek vysoké pevnosti. Je doplněn plastovým hygienickým sedátkem, pevnými područkami a opěrkou zad. Opěrné nohy umožňují výškové nastavení sedačky a jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka židle: 50 cm

Nastavitelná výška sedu: 47-57 cm

Šířka sedu: 40 cm

Hloubka sedu: 40 cm

Nosnost: 130 kg

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním židle si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním židle konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Židli nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 130 kg.

Při skládání a nastavování výšky židle postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Při užívání židle musí být všechny nohy v kontaktu s podkladem.


Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte židli k sezení.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části sedačky, tj. kompletní skládací rám se sedátkem a opěrkou zad.

ROZLOŽENÍ RÁMU

Vyjměte z krabice skládací rám. Rozevřete nejprve jednu bočnici, pak druhou bočnici a zdvihněte sedačku směrem nahoru. Nastavte bočnice do polohy odpovídající šířce sedu a sedačku zaklapněte do úchyťů na rámu bočnic. Nyní je sedačka připravena k použití.

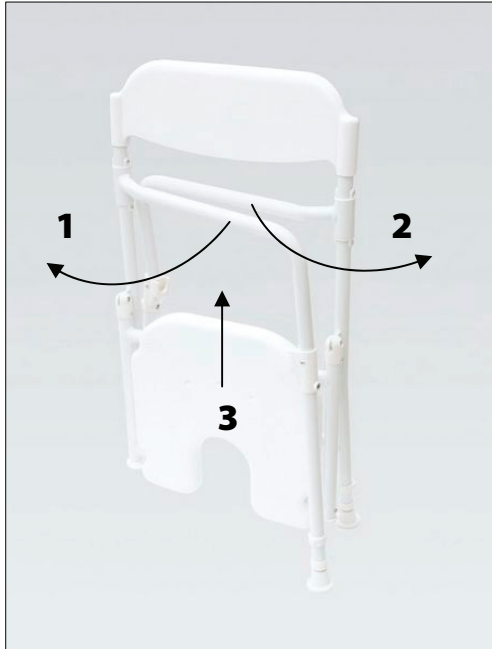


Rozložení rámu



Zacvaknutí sedačky

NASTAVENÍ VÝŠKY ŽIDLE

Pro nastavení výšky židle vytáhněte aretační „E“ pojistku (6) a tahem/tlakem nastavte požadovanou délku nohy. Pojistku pak ve zvolené poloze vraťte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou.

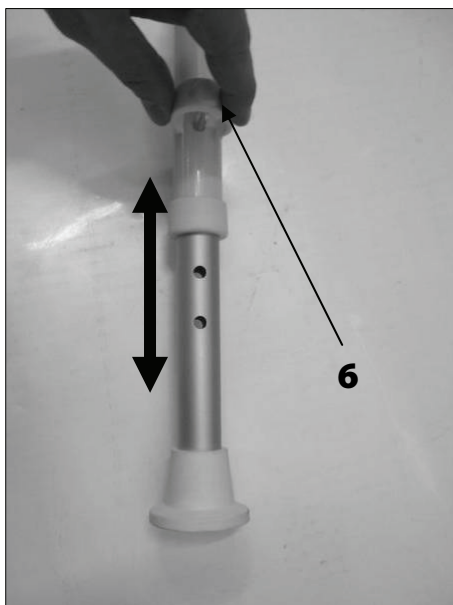

Nastavení výšky

ÚDRŽBA

Židli lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jisticích prvků, stav pryžových nástavců a polohu aretačních pojistek, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí. V případě nutnosti vyměňte opotřebované pryžové nástavce.

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.