


Madlo k posteli řady „S“

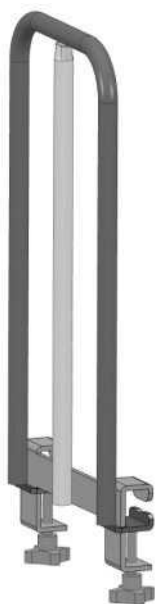

Model S-20




Model S-25

Ošetřovatelská postel Elbur s madlem řady „S“ (pohled zepředu)

Nožní část

Hlavová část

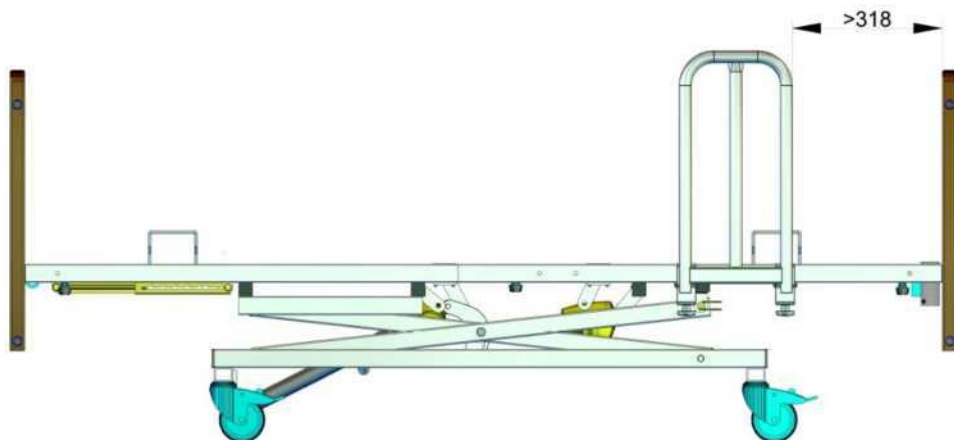
Varování!

- *Mezera mezi madlem k posteli řady „S“ a čelní deskou musí být větší než 318 mm! Nedodržení těchto pokynů může vést k zachycení pacienta a vážnému zranění!*
- *Upevňovací svorky musí být namontovány velmi těsně, aby madlo neohrožovalo pacienta!*

Madlo k posteli model S-20 nebo Madlo k posteli model S-25 se používá jako pomůcka při stání v průběhu ulehání a zvedání se z postele. Byla navržena speciálně pro ošetřovatelská lůžka Elbur, ale lze je upevnit i na jiné obdélníkové postranice v rozsahu: od 40x25 do 50x25.

Pokud se madlo k posteli řady „S“ používá s odlišným typem ošetřovatelského lůžka, musíte individuálně posoudit rizika a ujistit se, že madlo bude kompatibilní s postelí, na které je namontováno. U každého uživatele také ověřte vhodnost použití madla.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně madla k posteli a jeho zamýšleného použití nebo jeho montáže se obraťte na místního distributora nebo zákaznický servis Elbur.

Specifikace madla k posteli řady „S“	Model S-20	Model S-25
<i>Výška (od horní části matrace)</i>	470 mm	470 mm
<i>Hloubka (z vnější strany matrace)</i>	25 mm	50 mm
<i>Šířka (nad plochou matrace)</i>	245 mm	245 mm
<i>Hmotnost</i>	2,1 kg	2,5 kg
<i>Bezpečné pracovní zatížení</i>	160,0 kg	180,0 kg

Rozsah dodávky

1 madlo k posteli (hlavní kovová část: *model S-20* nebo *model S-25*), montážní součásti:

- a) 2 pozinkované háčky,
- b) 2 křížové knoflíky.

Montáž

Při montáži madla k posteli řady „S“ na ošetřovatelské lůžko Elbur postupujte takto:

- Zkontrolujte, že jsou pozinkované háčky zasunuté do rámových svorek (provádí výrobce) - *obr.1.*,
- Zkontrolujte, že jsou křížové knoflíky našroubované na místě (provádí výrobce) - *obr. 2.*,
- Mírně uvolněte křížové knoflíky, aby umožňovaly upevnění rámových svorek a pozinkovaných háčků zboku na rám postele
- Madlo lehce nakloňte, abyste je mohli namontovat na boční stranu rámu postele -
- Obr. 3
- Pokud vrchní část rámové svorky správně sedí na obdélníkové boční straně rámu postele, madlo zvedněte - *obr. 4.*
- Ujistěte se, že je madlo umístěno dále než 318 mm od čela postele.
- Utáhněte oba křížové knoflíky,
- Ujistěte se, že je madlo k posteli řady „S“ pevně připevněno.



Obr.



Obr.



Obr.



Obr.

Demontáž

Při demontáži madla k posteli řady „S“ z boční strany rámu postele povolte dostatečně křížové knoflíky, aby se uvolnily pozinkované háčky. Poté můžete madlo z ošetřovatelského lůžka snadno sundat.

Čištění

K čištění použijte mírně navlhčený hadřík a běžný, mírný, neagresivní čisticí prostředek.



Elbur sp. z o.o.
Dziatosza 34, 56-500 Sycow

Tel.: + 48 62 786 97 80
Fax: + 48 62 786 97 81 e-mail: info@elbur.eu www.elbur.eu

PTF-13.41-04 09/09/2020