



Systém pro přesun pacientů

EZ-200 Podložka pro přesun pacienta

Návod k použití

PŘEDMLUVA

Před použitím tohoto výrobku doporučujeme, abyste si přečetli všechny informace uvedené v tomto návodu k použití. Konstrukce a vylepšení výrobku jsou v souladu s požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Tyto pokyny jsou pouze vodítkem a nenahrazují protokoly a postupy, které navrhl váš koordinátor pro manuální manipulaci.

POPIS VÝROBKU

EZ-200 je lehké skládací zařízení pro přesun pacientů, na kterém se přenáší pacienti mezi postelí a rentgenovým stolem, operačním stolem, sprchovým vozíkem nebo nosítky sanitky. Jedná se o efektivní podložku pro přesun pacienta a polstrovanou přesuvnou trubici v jednom.

SPECIFIKACE VÝROBKU

EZ-200	
Velikost ($\pm 3\%$)	156x55 cm (rozložená)
Čistá hmotnost	0,9 kg

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před přenosem pacienta se ujistěte, že jsou postel, nosítka, vozík a stoly bezpečně zajištěny brzdou.
- Předtím, než na ně položíte EZ-200, ujistěte se, že jsou postel a nosítka, vozík či stoly ve vyrovnané poloze. Důrazně se doporučuje, aby všechny povrchy byly ve vyrovnané poloze a nebyly mezi nimi žádné mezery.
- Nesterilizujte EZ-200 při vysoké teplotě.
- Při rolování EZ-200 se ujistěte, že jsou vlasy pacienta umístěny na vnější vrstvě z dosahu rolování, aby při rolování nedošlo k namotání vlasů.
- EZ-200 očistěte povrchovým dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte vysoce teplotní sterilizace.
- Bezpečné pracovní zatížení je 150 kg

NÁVOD K OBSLUZE



1. Rozložte EZ-200 a zatlačte jej k pacientovi.



2. Nakloňte pacienta na jednu stranu a vsuňte EZ-200 pod pacienta




3. Opatrně pacienta tlačte a EZ-200 jednoduše přejeďte přes mezeru z postele do postele.



4. Nakloňte pacienta na stranu a vysuňte EZ-200 zpod pacienta. Pak můžete podložku snadno vytáhnout.

VÝKRES A SEZNAM ČÁSTÍ

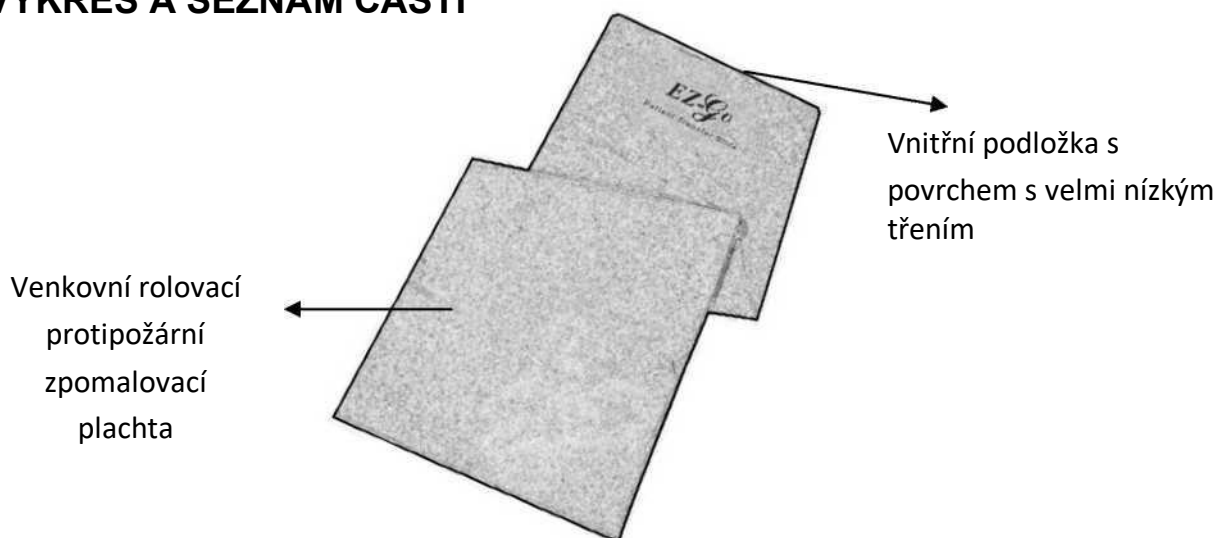

KONTROLNÍ SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH FUNKCÍ

Položka	Obsah kontroly a požadavky na bezpečnost	Výsledek kontroly	Komentář
1	Jsou uvedené informace o zákazníkovi úplné?	OK	
2	Je zobrazený jazyk stejný jako požadoval zákazník?	OK	
3	Ujistěte se, že jsou všechny základové šrouby bezpečné a nástroj je v dobrém stavu	OK	
4	Potvrďte, že jsou připevněny všechny výstražné značky a označení.	OK	
5	Povrchy, hrany nebo rohy byly zbaveny otřepů	OK	
6	Typový štítek	OK	
7	Značka CE	OK	
8	Návod k použití	OK	
9	Zkontrolujte bezpečnostní prvky odkazující na TCF	OK	
10	Podepsané ES prohlášení o shodě	OK	

ES prohlášení o shodě

Níže podepsaný, Terry Kuo, zastupující EZ-Care Solution Co. Ltd., 5F., No. 15, Lane 548, RueiGuang Rd., Neihu District, Taipei, Tchaj-wan (Čína) 114; dodavatel prohlašuje, že výrobky popsané níže:

Systém pro přesun pacientů EZ-Go

Model:

EZ100/100P/110/150/150P/200/211 řady /215/221/230/250 Podložka na přesun pacienta

EZ-115 Sada pro domácí péči

EZ-300/EZ-410 Otočný polohovací polštář

EZ-510/520/EZ-510 Deska pro přesun typu motýl

EZ-600 (6 směrná) Multifunkční podložka pro přesun pacienta

EZ-610 (6 směrná plus) Multifunkční podložka pro přesun pacienta

EZ-710 Evakuační křeslo pro přesun pacienta

EZ900/905/910/915/925/900B/900C/905B/901B/915B/925B Pás pro přesun pacienta

EZ-950 Repoziční pás

EVC-100/200/300 Nouzová evakuační lehká nosítka

EVC400/EVC500 Nouzová evakuační podložka/Evakuační matrace

Systém prevence pádu CareWatch

Model:

OWG-MAT/CW400 Jednosměrná protiskluzová matrace

PA-BED / PA-CHAIR bezpečnostní podložka s alarmem

CW100 Nastavitelná pomocné madlo k posteli

CW-300 Multifunkční chodítko



jsou prostředky třídy I dle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Pokud je používán a udržován v souladu s obecně uznávanými pravidly správné praxe a doporučeními v návodu k použití, splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Pro nejvíce specifická rizika tohoto zařízení byla bezpečnost a shoda se základními požadavky směrnice posuzována na základě:

- Mezinárodní norma ISO 14971:2000.

EC REP

Obelis s.a.

Bd General Wahis 53

1030 Brussels, Belgie

Tel: +3227325954 Fax:

+3227326003

mail@obelis.net

výkonný ředitel

Podepsáno na Tchaj-wanu dne 14. července 2020

EZ-Care Solution Co. 5F, No. 15 Lane 548 Rueiguang Rd. Neihu Dist. Taipei, Tchaj-wan

TEL: +886-2-2659-2277 FAX:+886-2-2798-8321 E-mail: info@gumt.com.tw Web: www.ezcaresolution.com