

Návod k použití


PŘEDMLUVA

Před použitím tohoto výrobku doporučujeme, abyste si přečetli všechny informace uvedené v tomto návodu k použití. Konstrukce a vylepšení výrobku jsou v souladu s požadavky Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích. Tyto pokyny jsou pouze vodítkem a nenahrazují protokoly a postupy, které navrhl váš koordinátor pro manuální manipulaci.

POPIS VÝROBKU

EZ-510 je speciálně navržená přesuvná deska, která se používá k přesunu pacientů mezi postelí a vozíkem nebo z vozíku do auta. Její speciálně zaoblený tvar umožňuje její použití na područkách vozku. Je lehká a snadno se přenáší.

VÝKRES

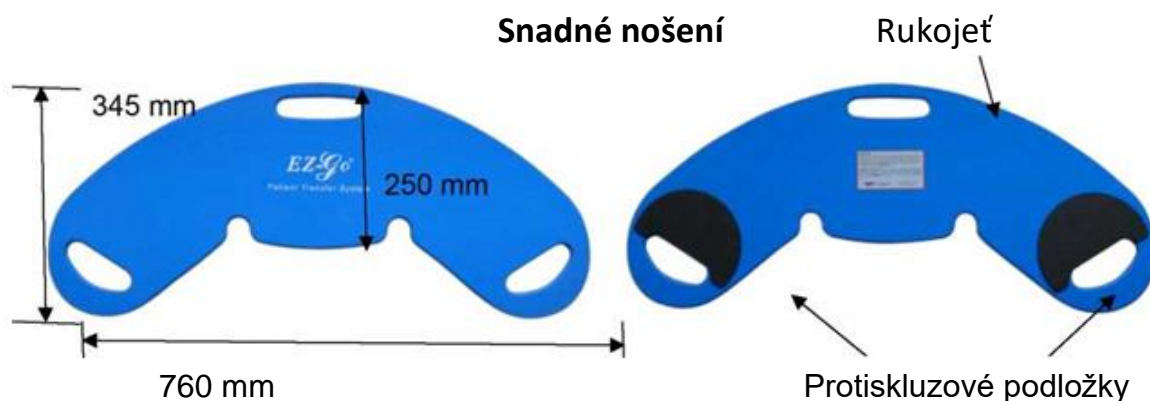

SPECIFIKACE VÝROBKU

Velikost: 760mm x 345mm x10mm (± 10 mm)

Nosnost: 130 kg

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím přesuvné desky ji opatrně ohněte, abyste zkontrolovali její pevnost a trvanlivost. Vizuálně zkontrolujte, zda není na desce jakákoliv trhлина. Nepoužívejte desku, pokud je poškozená.
- Před přenosem pacienta se ujistěte, že jsou postel a vozík bezpečně zajištěny brzdou a oba povrchy jsou vyrovnány.
- Maximální hmotnost je testována na 130 kg.
- Nesterilizujte EZ-510 při vysoké teplotě.

POKYNY K POUŽITÍ



Umístěte invalidní vozík co nejbližší k posteli. Speciální konstrukce přesuvné desky typu motýl dobře funguje na loketní opěrce invalidního vozíku, takže ji lze použít pro ty invalidní vozíky, u kterých nelze loketní opěrky odstranit. Přesuvná deska typu motýl funguje jako most mezi postel a vozíkem. Umístěte desku pod kyčle pacienta a druhou stranu na druhý povrch. Chcete-li umístit desku pod pacienta, nakloňte jej mírně opačným směrem. Po přesunu desku vyjměte. Stejný způsob lze také použít pro přepravu z invalidního vozíku na sedačku auta.

ES prohlášení o shodě

Níže podepsaný, Terry Kuo, zastupující EZ-Care Solution Co. Ltd., 5F., No. 15, Lane 548, RueiGuang Rd., Neihu District, Taipei, Tchaj-wan (Čína) 114; dodavatel prohlašuje, že výrobky popsané níže:

Systém pro přesun pacientů EZ-Go

Model:

EZ100/100P/110/150/150P/200/211 řady /215/221/230/250 Podložka na přesun pacienta

EZ-115 Sada pro domácí péči

EZ-300/EZ-410 Otočný polohovací polštář

EZ-510/520/EZ-510 Deska pro přesun typu motýl

EZ-600 (6 směrná) Multifunkční podložka pro přesun pacienta

EZ-610 (6 směrná plus) Multifunkční podložka pro přesun pacienta

EZ-710 Evakuační křeslo pro přesun pacienta

EZ900/905/910/915/925/900B/900C/905B/901B/915B/925B Pás pro přesun pacienta

EZ-950 Repoziční pás

EVC-100/200/300 Nouzová evakuační lehká nosítka

EVC400/EVC500 Nouzová evakuační podložka/Evakuační matrace

Systém prevence pádu CareWatch

Model:

OWG-MAT/CW400 Jednosměrná protiskluzová matrace

PA-BED / PA-CHAIR bezpečnostní podložka s alarmem

CW100 Nastavitelná pomocné madlo k posteli

CW-300 Multifunkční chodítko



jsou prostředky třídy I dle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Pokud je používán a udržován v souladu s obecně uznávanými pravidly správné praxe a doporučeními v návodu k použití, splňuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Pro nejvíce specifická rizika tohoto zařízení byla bezpečnost a shoda se základními požadavky směrnice posuzována na základě: - Mezinárodní norma ISO 14971:2000.

výkonný ředitel Podepsáno na **Tchaj-wanu** dne **16. března**



Obelis s.a.

Bd General Wahis 53

1030 Brussels, Belgium

Tel: +3227325954 Fax:

+3227326003

mail@obelis.net