

NAVODILA ZA UPORABO

TOALETNI STOL 513, 513 S



Distribucija:

AVIVA d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec, e-pošta: aviva@aviva.si, splet: www.aviva.si

UPORABA

Toaletni stoli spadajo v skupino kompenzacijskih pripomočkov za telesno prizadete osebe in za osebe z znižano mobilnostjo. Ti stoli se uporabljajo predvsem tam, kjer oseba ni sposobna uporabiti standardni WC.

Konstruirani so tako, da olajšajo osebno higieno in hkrati zmanjšajo rizike pri uporabi stranišča. Toaletni stoli omogočajo uporabnikom samostojnejšo osebno higieno in olajšajo delo negovalnemu osebju.

OPIS

Okvir stolov je izdelan iz visokokakovostnega jekla, na katerega je pritrjen plastični toaletni sedež in plastična toaletna posoda (ACC/5A). Za izboljšanje udobnosti je stol opremljen z oblazinjeno oporo zadaj in z oblazinjenim sedalom. Oblazinjene površine lahko čistite z vodo. Oporne noge omogočajo nastavitev ustrezne višine sedala (tabela) in imajo za boljšo varnost protidrse gumijaste natike. Tip 513 S ima odstranljive opore za roke.

OPOZORILO

Pred uporabo se o ustreznosti stola posvetujte z vašim zdravnikom.

Pred uporabo toaletnega stola preberite navodila in se v primeru nejasnosti posvetujte z vašim prodajalcem.

Pri montaži izdelka bodite previdni, da ne pride do poškodb prstov.

Vedno kontrolirajte, da je voziček suh in da so odstraneni ostanki čistilnih sredstev.

Stol ne preobremenite in nikoli ne prekoračite maksimalno statično nosilnost 120 kg (glej nalepko na izdelku).

Maksimalna dinamična obremenitev znaša 100 kg.

Pri uporabi stola se morajo vedno vse štiri noge dotikati nespolskih tal.

Za zagotovitev maksimalne varnosti redno kontrolirajte stanje celotnega stola.

Pri transportu (avto, avtobus, vlak ipd.) nikoli ne sedajte na stol.

Toaletni stol ni primeren za uporabo v vlažnem okolju (prha ipd.).

VSEBINA EMBALAŽE

Prepričajte se, da so v paketu vsi deli: okvir s nogami, opora za hrbet, opore za roke, oblazinjen sedež s plastično toaletno posodo ACC/5A.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Toaletni stol čistite z vodo in z blagimi čistilnimi in dezinfekcijskimi sredstvi, ki ne vsebujejo razredčil. Za varno uporabo stola vam priporočamo redno kontrolo vseh varovalk in vijakov, ter redno čiščenje vseh delov stola.

SERVIS IN POPRAVILA


Če je potrebno popravilo ali servis izdelka kontaktirajte vašega prodajalca.

NASTAVITEV VIŠINE

Za nastavitve višine najprej odstranite prečne „E“ zatiče (A), nato nastavite željeno višino nog in zopet vstavite prečne zatiče. Prepričajte se, da so vse štiri noge nastavljene na enako višino in da so zatiči v pravilnem položaju.



namestitvev zatičev

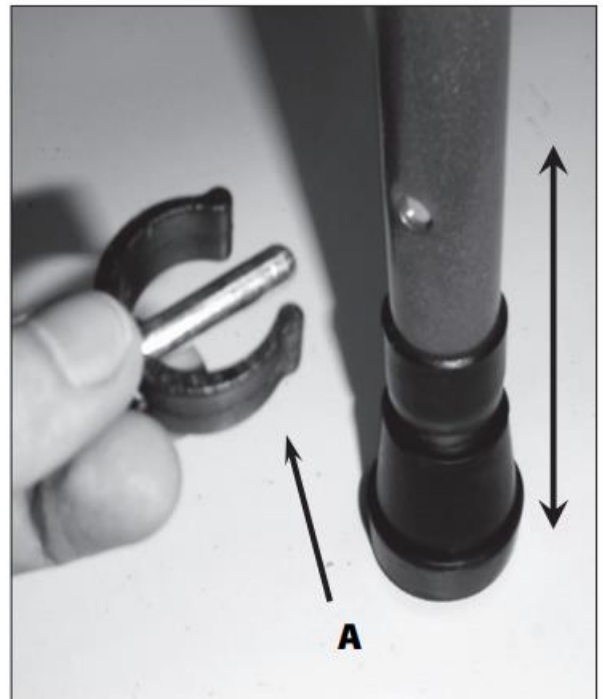

zatič za nastavitvev višine

NAMESTITEV PLASTIČNE POSODE IN OPOR ZA ROKE

Pred uporabo stola najprej odstranite oblazinjeno sedalo in pokrov posode. Plastično posodo odstranite od zadaj, ali pa dvignite sedežni obroč. Za udobnejše sedanje pritisnite varovalko B in odstranite naslon za roke.



odstranitev / vstavitev plastične posode



odstranitev naslona za roke