

NÁVOD K POUŽITÍ

KOMBINOVANÉ KŘESLO DO SPRCHY A NA WC

808, 808 C, 808 W



POUŽITÍ

Kombinované klozetové a sprchové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům toaletu a osobní hygienu, eliminuje riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavený sprchový kout nebo WC.

POPIS

Duralový rám křesla je doplněn omyvatelným vyměkčeným sedátkem s výřezem a opěrkou zad, plastovou toaletní nádobou (ACC/5A), dvoudílnými odklopnými a odnímatelnými podnožkami s výškově stavitelnými stupačkami, odklopnými polstrovanými područkami a madly pro tlačení. Křeslo je dále vybaveno čtyřmi otočnými kolečky s nášlapnou brzdou. Model 808 je vybaven rychloupínacími zadními poháněcími plnými koly s obručemi. Model 808 W má rozšířený sed a zvýšenou nosnost.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před používáním křesla si přečtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele. Při montáži křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Vždy kontrolujte, zda je křeslo suché a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 100 kg (viz štítek).

Křeslo 808 W má zvýšenou nosnost 160 kg (viz štítek).

Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.


Pro zachování maximální bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků. Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte křeslo k sezení.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám křesla, čtyři otočné vidlice s kolečky, dvě odnímatelné podnožky se stupačkou, opěrka zad s područkami, sedák s oddělitelnou centrální částí, plastová toaletní nádoba s víkem ACC/5A, dva aretační šrouby k připevnění opěrky zad a dvě zadní poháněcí kola s rychloupínací osou (u modelu 808).

SLOŽENÍ KŘESLA

Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky. Vyšroubujte šrouby (1) na zadní straně, spodní část opěrky zasuněte do otvorů v rámu (A) a šrouby (1) dotáhněte. Vytáhněte aretační „E“ pojistku (2), zasuněte kolečko do otvoru v rámu (B), nastavte požadovanou výšku křesla a pojistku zasuněte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou. U modelu 808 připevněte zadní kola stisknutím plastové krytky pojistky rychloupínacího zámku ve středu kola (2) a kola zasuněte a zacvakněte do úchyty. Nasadte podnožky na úchyty v přední části rámu (C) a otočte směrem dovnitř až zapadne bezpečnostní pojistka (4) (podnožky odklopíte uvolněním této pojistky). Pro nastavení výšky stupačky povolte a opět utáhněte šroub (5). Nyní je křeslo připraveno k použití.

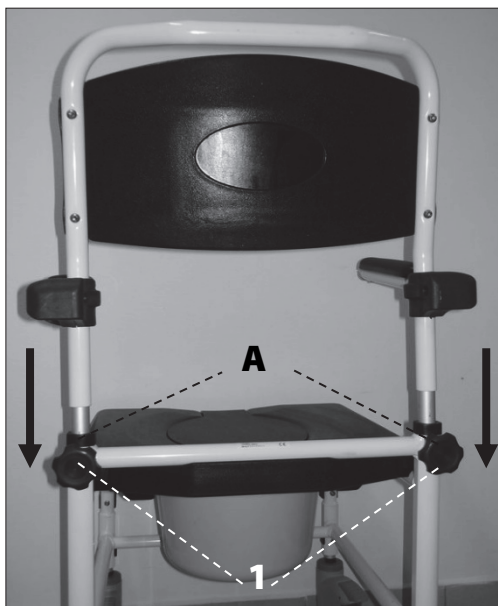


Nasazení opěrky zad

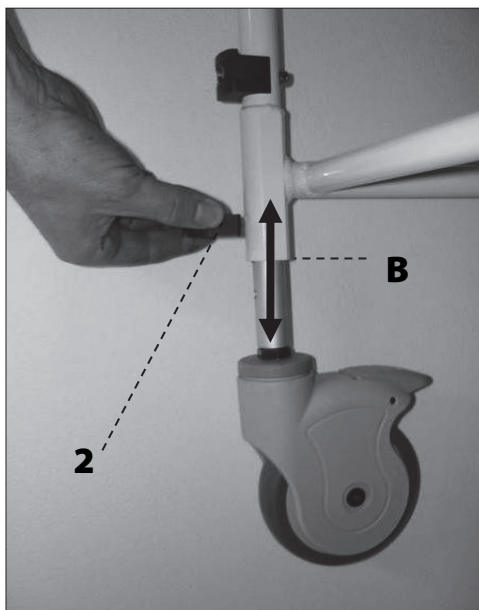

Připevnění koleček a nastavení výšky sedu



Připevnění zadních kol

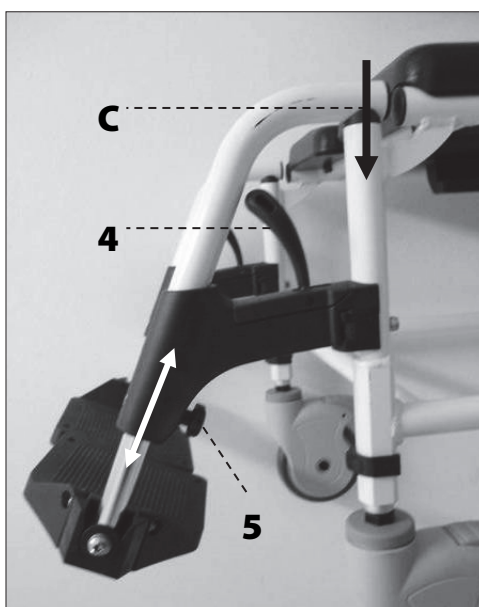

Připevnění a nastavení výšky stupaček

MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU

Pro použití křesla sundejte centrální oddělitelnou část a odstraňte víko plastové nádoby. Nádobu pak lze vysunout z držáků pod sedákem směrem dozadu.

ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a bezpečnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jistících prvků, koleček i brzd a odstraňovat mechanické nečistoty všech částí. Doporučujeme občasné promazání pohyblivých částí (olej WD 40).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.