

**drive**<sup>TM</sup>

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

Stohovatelný vanový  
stupínek

Položka #RTL12068

**drive**<sup>TM</sup>

[www.drivemedical.com](http://www.drivemedical.com)

Vanový stupínek Drive Bath je navržen tak, aby usnadňoval vstup a výstup z vany. Vanový stupínek Drive má velký plochý protiskluzový nášlapný povrch se zabudovanými protiskluzovými podložkami.

Podle pokynů níže lze kombinovat dva nebo více stupínků pro zvýšení výšky schodů.


## Návod

Chcete-li zkombinovat více vanových stupínků, postupujte podle pokynů níže.

1. Umístěte vanový stupínek na rovný povrch.
2. Pomocí mince odstraňte všechny 4 bílé kroužky umístěné na horní části vanového stupínku. Uchovejte je pro budoucí použití.



3. Umístěte druhý vanový stupínek na první, nasuňte výstupky na spodní straně stupínku do příslušných otvorů. Pevným zatlačením zajistěte na místě.

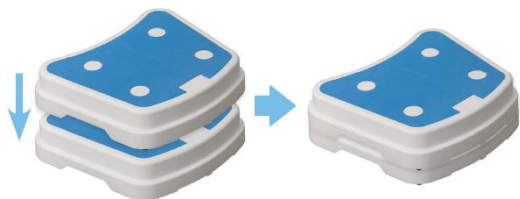

## Záruka 1 rok

Na váš výrobek značky Drive se vztahuje záruka na vady materiálu a provedení po dobu jednoho roku od původního data nákupu prvním kupujícím.

Toto zařízení bylo vyrobeno podle přísných norem a před odesláním bylo pečlivě zkontrolováno. Tato jednoletá omezená záruka je vyjádřením naší důvěry v materiály a zpracování našich výrobků a naší záruky dlouholeté spolehlivé služby.

Tato záruka se nevztahuje na poruchy zařízení způsobené nesprávným použitím nebo nedbalostí vlastníka nebo běžným opotřebením. Záruka se nevztahuje na opotřebitelné součásti, jako jsou gumové doplňky, kolečka a rukojeti, které podléhají běžnému opotřebení a vyžadují pravidelnou výměnu.

Pokud máte dotazy týkající se vašeho zařízení Drive nebo této záruky, kontaktujte autorizovaného prodejce Drive.

© 2014 Medical Depot, Inc. Všechna práva vyhrazena.  
Drive je ochranná známka společnosti Medical Depot, Inc.  
Port Washington N.Y. 11050 USA Vyrobeno v Číně.