



## Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 2510, 2515, 2420 & 2474

**Výrobek:** Čtyřbodová hůl



Zobrazený model:

2420

Základní šířka:

15 cm

Výška:

64-90 cm

Maximální hmotnost

uživatele: 125 kg



Zobrazený model:

2474

Základní šířka:

34 cm

Výška:

70-95 kg

Max. hmotnost

uživatele 125 kg



### POPIS

Hole vyrobené z hliníkové trubky s chromovanými ocelovými základnami, které jsou výškově nastavitelné tak, aby vyhovovaly většině uživatelů. Jde o tzv. čtyřbodovou hůl, která pro stabilitu využívá základnu „čtyřkolky“.

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností v důsledku s dlouhodobou nemocí nebo zotavováním se po poranění či nemoci. Tato pomůcka je navržena tak, aby poskytovala oporu a pomáhala při chůzi/mobilitě pacienta.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, konzultovali, jaký model hole je nejvhodnější pro vaše potřeby. Mohou vám také pomoci nastavit hůl do správné výšky, aby poskytovala správnou podporu a poradit, jak používat výrobek z hlediska vašeho zdravotního stavu.

### NASTAVENÍ

Výšku lze seřídit povolením rýhovaného kroužku na spodní části madla a / nebo stlačením pružinového tlačítka. Tak se hole nastaví na požadovanou výšku. Vždy se před použitím přesvědčte, zda pružinové tlačítko zapadlo zpátky do seřizovacího otvoru a zda je rýhovaný kroužek utažený.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při použití pomůcky na mokřém nebo vlhkém povrchu, především na dlážděných podlahách, je zapotřebí počínat si se zvýšenou opatrností. Tato pomůcka se nehodí pro použití na měkkém povrchu, jako je například písek. Pokud se hole ohne, okamžitě ji přestaňte používat, nechejte ji opravit nebo ji vyměňte.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499





<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na holi.</p>	<p>Každý týden kontrolujte, zda nedošlo k poškození upevňovacích nebo seřizovacích prvků.</p> <p><b><u>ČIŠTĚNÍ</u></b> K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.</p> <p><b><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u></b> Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><b><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u></b> Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.</p>
--	--

