



**Informační list výrobku** - verze 3 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 2511, 2512 & 2513

**Výrobek:** Zesílené chodítko



Zobrazený model: 2511/2512/2513

**SPECIFIKACE**

Hloubka: 54 cm

Šířka: 77 cm

Výška 2511: 63-71 cm

Výška 2512: 74-82 cm

Výška 2513: 84-92 cm

Hmotnost výrobku: 2 kg

Max. hmotnost uživatele: 318 kg

**POPIS**

Zesílené chodítko zhotovené z ocelových trubek, které jsou výškově nastavitelné. Je k dispozici ve třech modelech různých výškových variant.

**ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:**

Tento výrobek je navržen jako pomůcka pro osoby s omezenou pohyblivostí / pohybovou schopností v důsledku s dlouhodobou nemocí nebo zotavováním se po poranění či nemoci.

Chodítko je určeno k poskytování podpory a stability při chůzi. Je navrženo tak, aby uživatel mohl chodit v co nejvzpřímenější pozici. Chodítko mohou používat pouze osoby s dostatečně silnou horní částí těla, které umí udržet rovnováhu a zároveň posunout chodítko vpřed.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

Doporučujeme, abyste s kvalifikovanou osobou, jako je váš dodavatel nebo zdravotnický pracovník, konzultovali, jaký model chodítka je vhodný pro vaše potřeby. Mohou vám také pomoci nastavit chodítko na správnou výšku a ukázat jeho správné použití.

Uživatel musí stát v mezích půdorysu rámu a posouvat jím dopředu, dokud nebudou zadní nohy ve stejné rovině jako chodidla uživatele. Uživatel se pak může posunout dopředu a proces zopakovat. Je možné, že bude potřebná pomoc pečovatele, a to podle úrovně schopností pacienta.

**NASTAVENÍ**

V dolní části každé nohy jsou pružinová tlačítka, která umožňují nastavit každou nohu na příslušnou výšku. (Jde to snadněji, pokud chodítko otočíte vzhůru nohama).

Po nastavení se ujistěte, že jsou všechny nohy ve stejné výšce a že jsou pružinová tlačítka před použitím ve správné pozici a zajištěna.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na chodítku.</p>	<p><b><u>BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ</u></b> Vhodné pouze pro použití na rovných plochách. Buďte opatrní, když se pohybujete po nakloněné ploše. Před použitím se vždy ujistěte, že je chodítko vyrovnané a vyvážené. Nepokoušejte se chodítko používat na schodech ani na eskalátorech. Nepokoušejte se překonat obrubníky nebo překážky bez patřičné asistence. Na rámu nepřenášejte tašky ani ostatní předměty. Před použitím se ubezpečte, zda jsou všechny upevňovací prvky zajištěné a zda není konstrukce chodítka vystavena nadměrnému ohybu nebo pohybu.</p> <p><b><u>ČIŠTĚNÍ</u></b> K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy rukojeti očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.</p> <p><b><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u></b> Rám výrobku (kromě koleček nebo úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><b><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u></b> Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.</p>
--	---