



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 3515

Výrobek: Skládací toaletní křeslo



Zobrazený model: 3515

SPECIFIKACE

Celková hloubka: 59 cm

Celková šířka: 51 cm

Celková výška: 90 cm

Hloubka sedu: 46 cm

Šířka sedu: 46 cm

Výška sedu: 51 cm

Hmotnost výrobku: 7 kg

Max. hmotnost uživatele: 133 kg

POPIS

Přenosné skládací toaletní křeslo s čalouněnou zádivou opěrkou, sedákem a krytem sedáku se zvedacími loketními opěrkami. Je dodáváno s odnímatelnou toaletní mísou a víkem, které lze snadno vyčistit.

Pro snadné skladování může být složeno.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Používá se jako snadno přenosné toaletní křeslo s odnímatelnou toaletní mísou.

NÁVOD K POUŽITÍ

Umístěte do vhodné místnosti a pozice pro potřeby klienta.

Rozložte toaletní křeslo jemným vytažením zadních nohou z hlavního rámu. Před použitím se ujistěte, že je křeslo zcela rozloženo a stabilní. Zasuňte toaletní mísu do kolejniček pod sedákem a položte kryt sedáku na toaletní sedák.

Pokud chcete křeslo použít, sejměte kryt sedáku a posuňte víko z toaletní mísy do zadní části křesla. Ujistěte se, že jsou loketní opěrky sklopeny a poskytují podporu. Sklopte loketní opěrky nahoru pro přenos a skladování.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Nikdy nepoužívejte toaletní křeslo na nerovném nebo šikmém povrchu.

Nikdy na křesle nestůjte.

Při sklápění a rozkládání křesla je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k sevření prstů do sklopných mechanismů na loketních opěrkách a sestavě hlavního rámu.

ČIŠTĚNÍ

Po každém použití očistěte hadříkem a jemným čisticím/dezinfekčním prostředkem.

Nepoužívejte škrabky ani drátěnky.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na křesle.</p>	<p><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u> Rám výrobku (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u> Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem</p>
--	--