



## Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

**Kód výrobku:** 4006 & 4008

**Výrobek:** Vanové sedátko Derby



Zobrazený model: 4006/4008

### SPECIFIKACE

Šířka sedu: 40 cm

Hloubka sedu: 20 cm

Hloubka nohy: 28 cm

4006 Výška: 15 cm

4008 Výška: 20 cm

Hmotnost výrobku: 1,5 kg

Max. hmotnost uživatele: 190 kg

### POPIS

Sedátko typu stolička z lisovaného plastu s velkými gumovými přísavkami, které umožňují stabilní připevnění. Vhodné pro použití v plastových vanách.

K dispozici ve dvou výškách:

4006 = 15 cm 4008 = 20 cm

### ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Poskytnout stabilní platformu, která pomůže uživateli při každodenním koupání.

### NÁVOD K POUŽITÍ

Umístěte sedátko do vany a ujistěte se, že čtyři gumové přísavky bezpečně drží. Vanové sedátko by nemělo pohybovat.

1. Pro vstup do vany použijte dostupné madlo.
2. Zapřete se pažemi i nohama a posuňte se dolů na vanové sedátko.
3. Posadte se na desku a umyjte se.
4. Po ukončení mytí, než vylezete z vany, nechte z ní vytéct vodu.

Vanové sedátko Derby můžete použít v kombinaci s vanou.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Buďte velmi opatrní při použití olejů a koupelových krémů, protože díky nim se může povrch vany stát klzký.

Na sedátku nestůjte!

### ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy sedátko očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným klzkým povrchem.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: [www.romamedical.co.uk](http://www.romamedical.co.uk)

Email: [sales@romamedical.co.uk](mailto:sales@romamedical.co.uk)

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na sedátku.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Výrobek je dodáván s 12 měsíční zárukou. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem.