



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 4279 & 4279D

Výrobek: Nástěnná tvarovaná sprchová sedačka



SPECIFIKACE



Zobrazený model: 4279D

Hloubka sedu: 37 cm

Šířka sedu: 42 cm

Výška sedu: 40-56 cm

Max. hmotnost uživatele: 120 kg



Zobrazený model: 4279

Hloubka sedu: 37 cm

Šířka sedu: 42 cm

Max. hmotnost uživatele: 120 kg

POPIS

Trvale osazená tvarovaná sedačka do sprchy, kterou lze sklopit ke zdi, když ji nepoužíváte. Volitelně nastavitelné opěrné nohy jsou k dispozici tak, aby vyhovovaly různým výškám uživatelů. Sedátko lze pomocí klipu sundat pro snadné čištění.

4279 - Bez nohou, 4279D - S nohama

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Umožní uživateli pohodlně a bezpečně sedět při sprchování.

NÁVOD K POUŽITÍ

Tato pomůcka musí být připevněna na nosnou zeď. Montáž provede způsobilá osoba. Upevnění provedte pomocí hmoždinek. Nemůžeme doporučit, jaké upevnění na zdi použít, protože to bude záviset na konstrukci vaší zdi, vyžádejte si radu od kvalifikované osoby, tj. stavitele.

Před upevněním sedačky ke zdi je zapotřebí nohy (pokud jsou k dispozici) upravit na danou výšku. Po montáži musí být nohy ve svislé poloze.

Nohy lze nastavovat individuálně tak, že odeberete sponu ve tvaru podkovy, posunete nástavec do nové polohy a sponu zpět osadíte.

Chcete-li sedačku spustit, zatlačte sedátko dolů do polohy. Pokud má výrobek nohy, zapadnou do polohy bez pomoci. Po použití zvedněte sedátko zpět do svislé polohy až do dalšího použití.

NESKLÁDEJTE sedátko tahem za nohy, protože by to poškodilo spojovací tyč z nerezové oceli a nohu samotnou. Pokud se nebudete řídit tímto návodem, dojde k zneplatnění záruky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Na pomůcce nestůjte!

Ujistěte se, že je uživatel oprávněn používat výrobek. Při použití buďte opatrní, protože některé koupelnové výrobky mohou učinit povrchy kluzkými.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



<p>Pokud máte s tímto výrobkem problémy, uveďte prosím sériové číslo, které naleznete na sedačce.</p>	<p><u>ČIŠTĚNÍ</u> K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy výrobek očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.</p> <p><u>ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU</u> Výrobek (kromě úchytů na berle) je dodáván se zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím. Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.</p> <p><u>PROBLÉMY/OTÁZKY</u> Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem</p>
---	--