



Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)

Kód výrobku: 4626H, 4627H & 4628H

Výrobek: Roštová vanová deska s madlem



SPECIFIKACE



Zobrazený model: 4626H/4627H/4628H

Hloubka: 23 cm

Tloušťka: 11 cm

4626H Šířka: 66 cm

4627H Šířka: 68,5 cm

4628H Šířka: 71 cm

Hmotnost výrobku: 2 kg

Max. hmotnost uživatele: 190 kg

POPIS

Roštová vanová koupelňová deska s madlem bude bezpečně spočívat na horní části vany, což uživateli umožní pohodlně sedět nad vanou při koupání nebo sprchování. Nastavitelné podložky jsou umístěny pod deskou, takže je možné provést úpravy tak, aby vyhovovaly jemným odchylkám v šířce vany. Kromě toho tyto podložky zabraňují sklouznutí desky z vany

K dispozici ve třech různých velikostech:

4626H Šířka: 66 cm

4627H Šířka: 68,5 cm

4628H Šířka: 71 cm

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Uživatelé mohou sedět na desce s nohama umístěnými ve vaně, díky čemuž není nutné sedět nízko ve vaně a usnadňuje se následné zvedání.

NÁVOD K POUŽITÍ A NASTAVENÍ

Chcete-li nastavit podložku na správnou šířku dle vany, povolte knoflík, upravte podložky na požadovanou šířku, aby se sedátko vešlo do vany, a znovu knoflík utáhněte.

Zapřete se pažemi i nohama a posuňte se dolů na vanovou desku. Posadte se na sedátko a umyjte se. Po ukončení mytí, než vylezete z vany, nechte z ní vytéct vodu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Na desce nestůjte!

Při použití buďte opatrní, protože některé koupelňové výrobky mohou učinit povrchy kluzkými.

V případě potřeby používejte protiskluzové rohože.

Při vstupu nebo výstupu z vany dbejte opatrnosti – v případě potřeby vyhledejte pomoc.

Roma Medical Aids Ltd.

York Road, Bridgend Industrial Estate, Bridgend, CF31 3TB

Company Registration No. 1869285

Website: www.romamedical.co.uk

Email: sales@romamedical.co.uk

Tel: 01656 674488 Fax: 01656 674499



Pokud máte s tímto výrobkem problémy,
uveďte prosím sériové číslo, které
naleznete na desce.

ČIŠTĚNÍ

K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy výrobek očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým povrchem.

ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU

Výrobek je dodáván s 12 měsíční zárukou. Jeho životnost se odhaduje na 5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. Životnost se také může značně zkrátit extrémním nebo nesprávným použitím.

Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, který vám poskytne informace o tom, jak výrobek zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady vrátí společnosti Roma k recyklaci.

PROBLÉMY/OTÁZKY

Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším dodavatelem