

Návod k použití BA-7254 (Držák toaletního papíru)

**Přčtete si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití.
Tento návod je pouze vodítkem.**

ÚVOD

Držák na toaletní papír je ideálním výrobkem pro osoby, které mají omezený pohyb ramenního kloubu. Slouží jim jako pomůcka pro otření intimních partií po použití toalety.


SPECIFIKACE

Délka	Hmotnost	Materiál
342 mm	125 g	ABS/TPR (zelená podložka)

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Vložte toaletní papír do štěrbinu držáku.
2. Papír několikrát obtočte kolem držáku.
3. Odtrhněte toaletní papír.
4. Vložte držák mezi nohy a podle potřeby se otřete.
5. Po otření spusťte držák do záchodové mísy a papír vyhod'te přímo do záchodové mísy a spláchněte jej.

UPOZORNĚNÍ

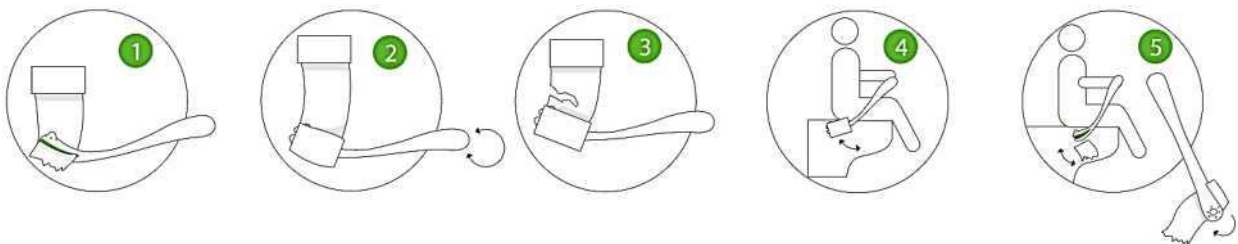

- Jedná se o pomůcku pro osobní hygienu; prosím, nesdílejte ji s jinými lidmi.
- Po použití prosím vyčistěte držák mýdlem a vodou.
- K dezinfekci pomůcky NEPOUŽÍVEJTE UV světlo.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.

ÚDRŽBA

Držák toaletního papíru lze čistit vodou a mýdlem.

