

## Návod k použití DA-5305 (Navlékač punčoch)

**Přečtěte si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití.  
Tento návod je pouze vodítkem.**

### ÚVOD

Navlékač punčoch pomáhá kompenzovat zdravotní postižení tím, že pomáhá člověku s oblékáním punčoch, aniž by se musel ohnout v pase nebo v bocích. Je vhodný pro všechny velikosti punčochových kalhot.


### SPECIFIKACE

Délka žlábků	Délka popruhu	Hmotnost	Materiál
220 mm	860 mm	95 g	PP (deska) / Polyester (rukojeť)

### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Srolujte spodní část punčochových kalhot až k patě a vložte do punčochových kalhot navlékač.
2. Natahujte punčochy na navlékač punčoch, dokud nebudou zcela na pomůcce. Ujistěte se, že je navlékač pevně umístěn ve špičce punčochy a punčochy nepřesahují přes okraj, kde jsou připojeny popruhy. (Obrázek 1)
3. Držte popruhy a spusťte navlékač na podlahu před nohou. Ujistěte se, že vyklenutá strana směřuje vzhůru.
4. Vložte nohu do navlékače a přetáhněte navlékač přes nohu, dokud se prsty nedostanou do špičky punčochových kalhot. (Obrázek 2)
5. Tahejte za popruhy, dokud se navlékač neuvolní z punčoch.

Obrázek 1

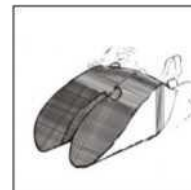

Obrázek 2



### VAROVÁNÍ

- Navlékač punčoch neperte v pračce.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.

### ÚDRŽBA

Navlékač punčoch čistěte pouze ručním praním.

Neperte v pračce.

